



Die Lunge beginnt an der Nasenspitze

... mit der
RC-Cornet® PLUS Familie

RC PLUS
CORNET®

Die Lunge beginnt an der Nasenspitze

Die Atemtherapie stellt einen wichtigen Baustein bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen der unteren und oberen Atemwege dar. Die Befreiung von Schleim ist bei Asthma, COPD, Mukoviszidose sowie chronischer Sinusitis die zentrale Herausforderung.

Das RC-Cornet® PLUS befreit die unteren Atemwege sanft von Schleim, reduziert Husten und Atemnot. Mit dem RC-Cornet® PLUS NASAL können auch die oberen Atemwege therapiert werden. Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.

Mit dem integrierten Vernebleranschluss ist die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie bei allen Varianten der RC-Cornet® PLUS Familie möglich. Dies verbessert die Medikamentendeposition und reduziert die Behandlungsdauer. Besonders bei Patienten mit Tracheostoma kann die Kombinationstherapie mit dem RC-Cornet® PLUS TRACHEO eine Verbesserung des Weaningprozesses sowie des Sekretmanagements bewirken.

Die Atemtherapie mit der RC-Cornet® PLUS Familie entspricht höchsten klinischen Anforderungen bezüglich Anwendung und Hygiene. Zudem belegen Studien*, dass die regelmäßige Atemtherapie mit der RC-Cornet® Familie den Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte bei COPD signifikant reduziert.

*Studien auf Anfrage erhältlich.



Löst Schleim in den oberen Atemwegen.

RC-Cornet® PLUS NASAL

- Linderung von Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- Hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- Verbessert die Belüftung von Nasennebenhöhlen und Mittelohr

Artikel-Nr. 2680 | PZN 12 441 330



Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot.

RC-Cornet® PLUS TRACHEO

- Mobilisation und Lösung von festsitzendem Bronchialschleim
- Verbesserung des Gasaustauschs

Artikel-Nr. 2690 | PZN 12 441 324



RC-Cornet® PLUS

- Mobilisation und Lösung von festsitzendem Bronchialschleim
- Ermöglicht auch Patienten mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion die Atemtherapie

Artikel-Nr. 2600 | PZN 12 419 336



Das Wirkprinzip und die Gebrauchsanweisung sind als Video unter www.cegla.de verfügbar.





Freie Nase – ohne Medikamente

Das RC-Cornet^{PLUS} NASAL befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim. Die Schleimhaut kann sich so bei regelmäßiger Anwendung wieder regenerieren. Die Nase wird besser belüftet und spürbar freier* – ganz ohne den Einsatz von Medikamenten. Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.



Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot


Die RC-Cornet^{PLUS} Familie nutzt die gesamte Ausatemluft zur effektiven Reinigung der Atemwege. Selbst sehr schwache Patienten können die Therapie nutzen. Das RC-Cornet PLUS[®] hat 2 Einstellungen mit je 4 Widerständen, beginnend ab einem Ausatemdruck von 5 cm H₂O. Bei Patienten mit Tracheostoma ermöglicht das RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO eine Atemtherapie über eine 15-mm-Kanüle (Tubus).

Ausgangssituation
Verengte und durch Schleim verstopfte Bronchien.


Einstellung 1: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege.
Verengungen werden geöffnet und somit Teile der Lungenbläschen wieder belüftet. Dies reduziert Atemnot und Überblähungen werden reduziert.

Einstellung 2: Mobilisierender Ausatemdruck zur Reduktion von Husten.
Der mobilisierende Ausatemdruck mit Vibrationen löst die starken Verschleimungen von den Bronchialwänden und verflüssigt diese. Der gelöste Bronchialschleim kann effektiv und einfach abgehustet werden. Die Anfälligkeit für Infekte wird gesenkt.

Ergebnis
Reduktion von Atemnot und Husten durch Schleimlösung sowie Verbesserung des Gasaustausches.

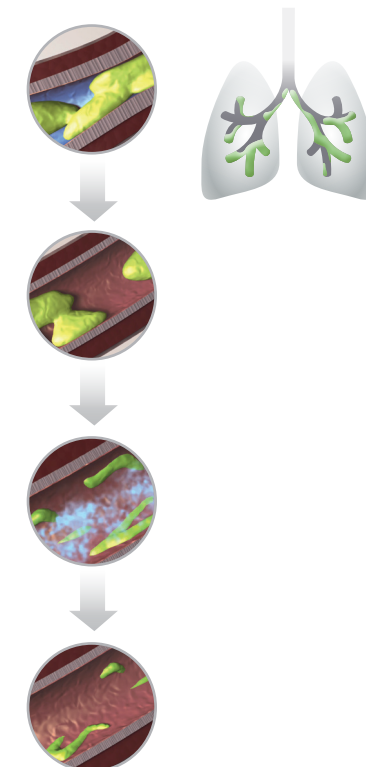


INFO

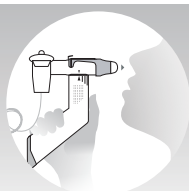

Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern effektiv kombinieren
Der integrierte ISO-genormte 22-mm-Vernebleransatz der RC-Cornet^{PLUS} Familie ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse.

Medikamente oder isotonische Kochsalzlösung können so schneller und effektiver in die Atemwege eingebracht werden. Die Therapiedauer der oberen und unteren Atemwege wird verkürzt. Die Medikamentendeposition verbessert sich.

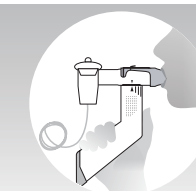

* bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar



Baukastensystem

Das RC-Cornet® PLUS Baukastensystem ermöglicht den Umbau eines jeden Basis-Produktes (RC-Cornet® PLUS, RC-Cornet® PLUS NASAL, RC-Cornet® PLUS TRACHEO) in alle anderen Produkte der RC-Cornet® PLUS Familie. Zur Umrüstung werden nur die entsprechenden Zubehörartikel benötigt.



	Produktfoto	Produktname	Beschreibung / Funktion*	PZN	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Positions-Nr.
obere Atemwege		RC-Cornet® PLUS NASAL	Befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim – ohne Medikamente	12 441 330	2680	
		RC-Cornet® PLUS NASAL SET (Nasenolive und Winkelstück)	Zum Umrüsten des RC-Cornet® PLUS auf das RC-Cornet® PLUS NASAL. Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 058 202	2683	
Tracheostomie		RC-Cornet® PLUS TRACHEO	Starke Verbesserung des Weaningprozesses und des Sekretmanagements durch gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie	12 441 324	2690	
		RC-Cornet® PLUS Tracheoansatz	Zum Umrüsten des RC-Cornet® PLUS auf das RC-Cornet® PLUS TRACHEO. Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 348 532	2621	
untere Atemwege		RC-Cornet® PLUS	Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	12 419 336	2600	14.24.08.0013
		RC-Cornet® PLUS Mundstück	Zum Umrüsten auf das RC-Cornet® PLUS, Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 348 503	2620	
		RC-Cornet® PLUS Zusatzmundstück oval	Für Schlaganfall- oder neuromuskuläre Patienten geeignet	13 753 391	2622	



Das Wirkprinzip und die Gebrauchsanweisung sind als Video unter www.cegla.de verfügbar.




INFO

RC-Cornet® PLUS

PZN 12 419 336 Artikel Nr. 2600

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenspezialarzt unter der Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

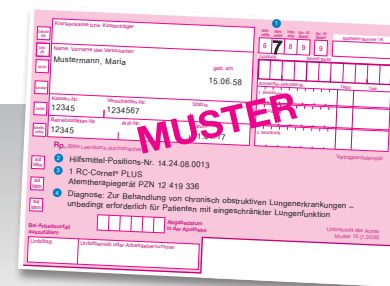

* Alle beiliegenden Gebrauchsanweisungen sind multilingual.

Weiteres Informationsmaterial und Videos sind in verschiedenen Sprachen auf unserer Website www.cegla.de verfügbar.



Mit Sicherheit Leichter Atmen

Ständiger Begleiter im Alltag,
Retter in der Notsituation!

Inklusive Sicherheitsbeutel,
Notfallplan und Schutzengel-
Anhänger




INFO

RC-Chamber® mit Mundstück

PZN 11 711 023 | Artikel-Nr. 30300

Austauschbare Masken und verschiedene Modellvarianten
erhältlich. Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder
Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001

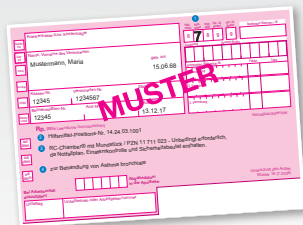

Medikamente sowie das Peak-Flow-Meter Personal Best® LR müssen separat verordnet werden
und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Rezeptmuster können angefordert werden.



← Weitere Informationen und
Filme zum RC-Chamber®

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Weitere Informationen und Anwenderfilme finden Sie unter:
www.cegla.de

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

Copyright 2018 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen
R. Cegla GmbH & Co. KG.
Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.