

NEUE
PRODUKTE



RC PLUS
CORNET®

Tonangebend in der Atemtherapie!

Das PLUS für mehr Lebensqualität
bei Erkrankungen speziell der
unteren Atemwege



Löst Schleim, reduziert
Husten und Atemnot.

Das PLUS für mehr Lebensqualität

Die Atemtherapie stellt einen wichtigen Baustein bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege dar. Die Befreiung von Schleim ist hierbei die zentrale Herausforderung.

Die Abwärtsspirale bei chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege

Bei chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege kommt es zu vermehrtem Husten, der Bildung von Bronchialschleim und als Folge davon häufig zu Atemnot.

Der Bronchialschleim bietet darüber hinaus einen Nährboden für Infekte, die häufig in Klinikaufenthalten münden. Ein Voranschreiten der Erkrankung wird begünstigt.



SYMPTOME
VERSCHLECHTERN SICH

Die Atemtherapie mit dem RC-Cornet[®] PLUS für mehr Lebensqualität

Das RC-Cornet[®] PLUS ist ein individuell einstellbares Hilfsmittel zum effektiven Lösen und Entfernen von festsitzendem Bronchialschleim. Dadurch reduzieren sich Atemnot und Husten. Dies sorgt für ein gesteigertes Wohlbefinden und eine verbesserte Lebensqualität.



SYMPTOME
VERBESSERN SICH



Studien¹⁾ belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet[®] Therapie den Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte reduziert. Fachverbände und Leitlinien empfehlen deshalb diese Therapie bei folgenden Krankheitsbildern: COPD (Chronisch obstruktive Bronchitis), Mukoviszidose, Bronchiektasie, Lungenemphysem, Raucherhusten und Asthma.

Tonangebend in der Atemtherapie

Das innovative und patentierte RC-Cornet® PLUS lässt Patienten leichter atmen – unabhängig vom Grad der individuellen Ausatemleistung.


Ein Hilfsmittel – viele Therapiemöglichkeiten:

- Individuell und nachhaltig auf den Patienten einstellbare Therapiemöglichkeiten.
- Ermöglicht auch Patienten mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion die Therapien mit einem stabilisierenden und mobilisierenden, oszillierenden Ausatemdruck.
- Verbessert den Gasaustausch und reduziert Atemnot durch Weitung der Atemwege.
- Reduziert Husten durch die effektive Reinigung der Bronchien von festsitzendem Bronchialschleim.
- Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern können gleichzeitig durchgeführt werden (Kombi-Therapie).
- Entspricht höchsten klinischen Anforderungen an Anwendung und Hygiene. Reinigung bis zu einer Temperatur von max. 134 °C.

Neues Design für mehr Effizienz und Komfort im Alltag

Vernebleranschluss für die Inhalation

Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern können zeitgleich durchgeführt werden. Dies reduziert die Therapiedauer und verbessert die Deposition der Medikamente.

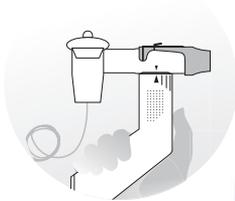

Auswahl der Behandlungsformen

Exakte und einfache Auswahl der zwei unterschiedlichen Behandlungsformen über das patentierte Mundstück.

Individuell wählbare Intensität

4 Widerstände am Gehäuse regulieren die Intensität der Therapien. Dies ermöglicht die Atemtherapie auch ganz schwacher Patienten.



Artikel-Nr. 2600 | PZN 12 419 336


Leiser während der Anwendung

Reduzierte Lautstärke durch neue Konstruktion.

Neues Schlauchdesign

Vereinfacht die Handhabung bei Reinigung und Zusammenbau.



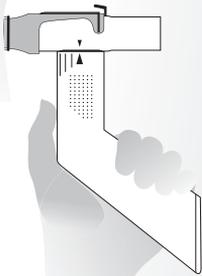

RC-Cornet® PLUS TRACHEO für tracheotomierte Patienten mit Kanüle

Das RC-Cornet® PLUS TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS. Sie verfügt über einen integrierten Tracheoansatz für Patienten mit einer Kanüle (Tubus). Ermöglicht die gleichzeitige Inhalations- und Atemphysiotherapie. Erleichtert und verkürzt ggf. das Weaning.
Artikel-Nr. 2690 | PZN 12 441 324

Eigenmanagement der Therapie

Effektives Eigenmanagement der Therapie wird unterstützt durch:

- einen individuellen Therapieplan
- ein übersichtliches Therapietagebuch
- eine kostenfreie App



VERFÜGBAR
Q3/2017

TAGEBUCH RC-CORNET® THERAPIE
Führen Sie das Tagebuch regelmäßig (morgens / mittags / abends). Die Symptome dokumentieren Sie bitte immer morgens.

Wochen-Tag	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	10. Tag	11. Tag	12. Tag	13. Tag	14. Tag	15. Tag	16. Tag	17. Tag	18. Tag	19. Tag	20. Tag	21. Tag	22. Tag	23. Tag	24. Tag	25. Tag	26. Tag	27. Tag	28. Tag	29. Tag	30. Tag	31. Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

INDIVIDUELLER THERAPIEPLAN

THEMASPLAN FÜR:

Einzelung 1 / Willensstand Minuten tägliche Anwendung

Einzelung 2 / Willensstand Minuten tägliche Anwendung

Stimm- Therapie Einzelung 1 / Willensstand Minuten tägliche Anwendung

Zusätzliche Anwendungsmaßnahmen:


Datum: _____ Arzt / Atemphysiotherapeut: _____ Kontrolltermin: _____

Tonangebend in der Atemtherapie!

Das RC-Cornet® PLUS nutzt die gesamte Ausatemluft zur effektiven Reinigung der Atemwege. Selbst sehr schwache Patienten können die Therapien nutzen. Das Hilfsmittel bietet über die Einstellungen am Mundstück zwei Behandlungsformen an:



EINSTELLUNG 2

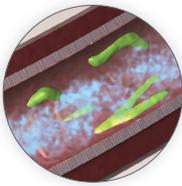


Mobilisation von Bronchialschleim reduziert Husten

EINSTELLUNG 2: Mobilisierender Ausatemdruck

zur Reduktion von Husten. Der mobilisierende asymmetrische Ausatemdruck mit Vibrationen löst die starken Verschleimungen von den Bronchialwänden und verflüssigt diese. Der gelöste Bronchialschleim kann dann effektiv und einfach abgehustet werden.

Ist die Reinigung vollzogen, reduziert sich automatisch der Husten. Zudem sinkt durch die Entfernung des Schleims die Anfälligkeit für Infekte.

ERGEBNIS

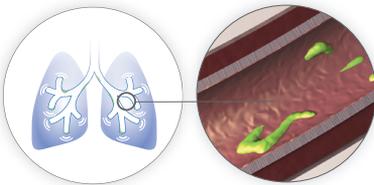

Ergebnis der RC-Cornet® PLUS Therapie

Reduktion von Atemnot und Husten durch Schleimlösung sowie Verbesserung des Gasaustausches.

Einen ausführlichen 3-D-Film sowie einen Anwenderfilm finden Sie auf www.cegla.de


Aufbau und Verbund der Atemwege

Täglich werden 10.000 Liter Luft eingeatmet. Diese Atemluft wird in der Nase gefiltert, befeuchtet und erwärmt. Eine optimale Vorbereitung für die Weiterverarbeitung in der Lunge.

Die oberen und unteren Atemwege bilden eine Einheit.

Erkrankungen der oberen Atemwege wie z.B. Schnupfen, akute oder chronische Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) sind weit verbreitet. Sie zeichnen sich meist durch starke, zähflüssige Sekretbildung aus. Geruchs- und Geschmackssinn werden dadurch häufig eingeschränkt. Einschränkungen der Nase können zudem Erkrankungen wie COPD, Asthma oder Mukoviszidose negativ beeinflussen.

Die Therapie und Pflege der oberen Atemwege kann daher einen positiven Einfluss auf Atemwegserkrankungen haben.

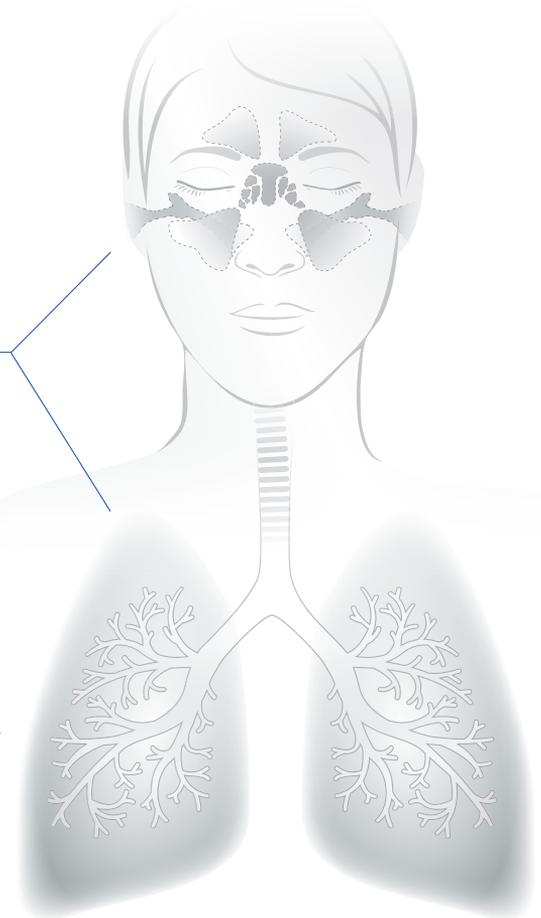

Natürlich die oberen Atemwege therapieren

Einzigartig für Ihre Gesundheit

Das RC-Cornet^{PLUS} NASAL befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim. Die Schleimhaut kann sich so bei regelmäßiger Anwendung wieder regenerieren. Die Nase wird besser belüftet und spürbar freier – ganz ohne den Einsatz von Medikamenten. Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.

Bei der Ausatmung entsteht ein individuell einstellbarer, positiver Ausatemdruck mit Schwingungen, der die Schleimhäute in den oberen Atemwegen therapiert – vergleichbar mit einer Massage.




Artikel-Nr. 2680
PZN 12 441 330

Die Wirkung der RC-Cornet^{PLUS} NASAL Therapie zeigt sich deutlich anhand von Bildern der Temperaturverteilung im Gesicht.

Ausgangsbefund einer chronischen Sinusitis mit deutlich angeschwollenen Schleimhäuten (verstärkte rote Einfärbung).

Nach Benutzung des RC-Cornet^{PLUS} NASAL deutliches Abschwellen der Schleimhäute und damit Weitung der Nasennebenhöhlen (Reduktion der roten Einfärbungen).

Die Nase ist freier.

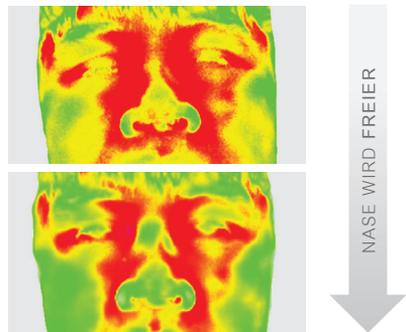


Atemtherapie für die oberen Atemwege

Effektiv, einfach und gut

- befreit die oberen Atemwege von Schleim
z. B. bei chronischer Sinusitis
- lindert den Husten bei
Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt bronchiale Hyperreagibilität¹⁾
z. B. bei Asthma
- hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- optimiert die Medikamentendeposition
- verbessert Erkrankungen der unteren Atemwege wie z. B. COPD oder Asthma

Atemtherapie und Inhalation mit Verneblern

Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern können dank des integrierten Vernebleranschlusses zeitgleich durchgeführt werden. Medikamente oder isotonische Kochsalzlösung können so schneller und effektiver in die Nase eingebracht werden. Die Therapiedauer verkürzt sich.

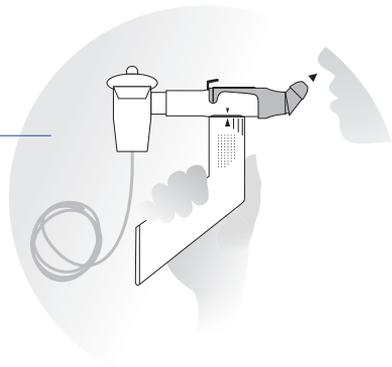

Wertvolle Pflege für die oberen Atemwege



Feuchtigkeitsgel für die Nase

Das Reinigungssystem unserer Nase ist vielen Belastungen ausgesetzt. Das RC-GEL NASAL legt sich wie ein Schutzfilm um die Nasengänge. Es reduziert Hautreizungen und Krustenbildungen an den Naseneingängen. Die Anwendung ist begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet.

Rein natürliche Inhaltsstoffe

Das RC-GEL NASAL zeichnet sich dank seiner natürlichen Zusammensetzungen durch eine besonders gute Verträglichkeit aus. Es ist daher für die tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, bei akuten Infekten, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet.

Artikel-Nr. 260 | PZN 12 510 686



Pflege ohne Nebenwirkungen

Die Nasenspülung mit der Nasendusche RC-RHINO HORN™ unterstützt die Reinigung der Nase und ihrer Schleimhäute. Reizpartikel sowie festsitzender Schleim werden entfernt. Die tägliche Anwendung schützt so effektiv vor Austrocknung und Infekten.

Einfache Anwendung

Die Nasenspülung mit dem RC-RHINO HORN™ funktioniert denkbar einfach: Mit der Dosierhilfe lässt sich die richtige Menge Salz zur Herstellung der isotonischen Kochsalzlösung leicht bemessen. Das Salz wird einfach mit lauwarmem Wasser vermischt – fertig!

Artikel-Nr. 821 | PZN 12 436 004

Ergänzende Produkte

RC-Clean

Reinigungsbeutel für die Mikrowelle.
Einfache und schnelle Reinigung von Medizinprodukten
sowie Babyartikeln.

Artikel-Nr. 5000 | PZN 10 751 032



RC-Cornet® PLUS NASAL SET

Mit dem Zubehör RC-Cornet® PLUS NASAL SET – bestehend aus Nasenolive (a.) und Winkelstück für die Inhalation (b.) – können Sie ein RC-Cornet® PLUS leicht für die Therapie der oberen Atemwege umrüsten.

Artikel-Nr. 2683 | PZN 13 058 202



a. Nasenolive

b. Winkelstück
für Inhalation

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Copyright 2017 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten,
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das
Unternehmen R. Cegla GmbH & Co. KG.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany



Vertrieb Österreich:
Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
8053 Graz
Tel: 0316 / 71 51 68
www.georgegger.at

