





Einstellungsanleitung




Für ROHO® DRY FLOATATION® Matratzenauflage

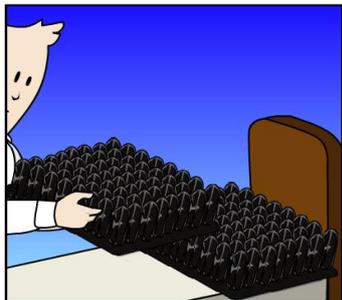


Schritt 1: Legen Sie die einzelnen ROHO Matratzen-segmente auf eine normale Matratze auf, sodass die Neoprenzellen nach oben zeigen. Verbinden Sie die Segmente durch die dafür vorgesehenen Druckknöpfe.

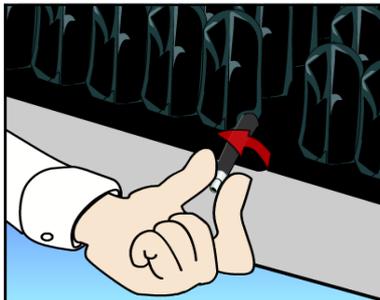


Schritt 2: Öffnen Sie ein Ventil eines Segments durch drehen gegen den Uhrzeiger. **Achtung!** Jedes Segment hat ein 2tes Ventil auf der gegenüberliegenden Seite. Vergewissern Sie sich, daß das andere geschlossen ist.

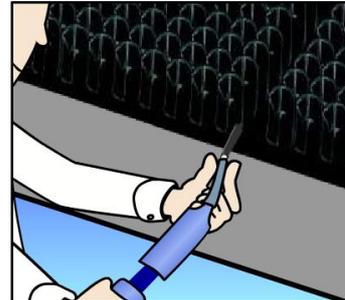


Schritt 3: Den Schlauch der Roho-Pumpe über das Ventil schieben und solange aufpumpen, bis sich das gesamte Segment leicht nach oben wölbt. Schließen Sie das Ventil und wiederholen Sie den Vorgang bei den anderen Segmenten.

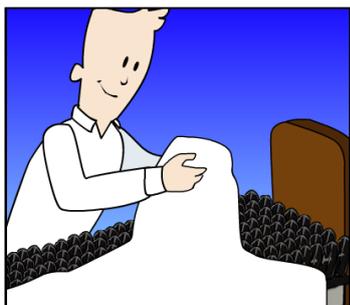


Schritt 4: Nun geben Sie ein Leintuch, Spannleintuch oder Inkontinenzbezug über die ROHO Matratzenauflage und die Matratze.

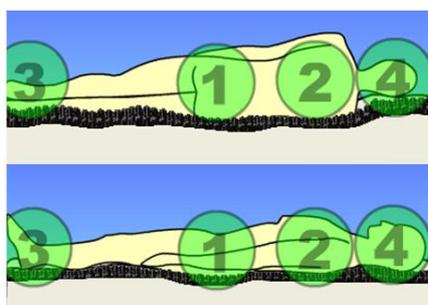

Schritt 5: Legen Sie den Patienten nun in die Position, in der er normalerweise liegt. Seitlich oder auf den Rücken.

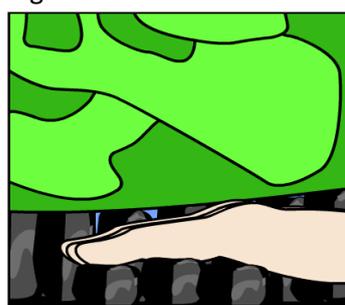

Schritt 6: Um die Segmente einzustellen, schieben Sie Ihre Hand zwischen Matratzenauflage und dem jeweiligen tiefsten knöchernen Punkt (diese Punkte sind aus der Abbildung von Schritt 5 ersichtlich).

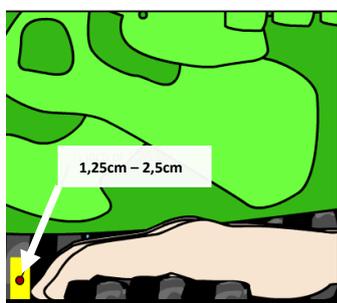

Schritt 7: Mit der freien Hand ein Ventil des jeweiligen Segmentes öffnen und Luft ablassen, während die Hand unter dem tiefsten Punkt des Patienten verbleibt. Soviel Luft ablassen, bis Sie mit Ihren Fingerspitzen die darunterliegende Matratze spüren. Lassen Sie weiter Luft aus, bis der Spielraum zwischen Knochen und der normalen darunterliegenden Matratze 1,25cm – 2,5cm beträgt. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Segment.

Nach der Durchführung dieser einfachen 7 Schritte ist Ihre Matratzenauflage eingestellt. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Matratze mit genügend Luft befüllt ist um eine optimale Antidekubituswirkung zu erzielen. Bei weiteren Fragen zur der Einstellung Ihres Kissens, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne.

Reinigung und Pflegeanleitung für ROHO® Produkte

Vor der Reinigung ist es notwendig, die Luft aus dem Kissen/der Matratze vollständig auszulassen. Dies erfolgt am einfachsten, indem das Ventil geöffnet wird und das Kissen oder die Matratze am hinteren Ende beginnend eingerollt wird. Im eingerollten, zusammengedrückten Zustand das Ventil wieder verschließen.

Die Reinigung kann per Handwäsche mit einer leichten Seifenlauge erfolgen oder das Kissen/die Matratze kann in der Waschmaschine gereinigt werden.

Reinigung in der Waschmaschine:

Bevor Sie das Kissen oder die Matratze in die Waschmaschine geben, ist es notwendig die Luft komplett auszulassen (siehe oben) und das Kissen/die Matratze in einen Schonbezug zu geben. Dafür kann auch ein Kopfpolsterüberzug verwendet werden.

Waschmaschineneinstellung:	Schonwaschgang 40°C
Waschmittel:	Empfohlen wird ein mildes Flüssigwaschmittel oder ein Mehrzweck-Desinfektionsreiniger.
Schleudern:	Nach dem Waschen das Kissen mit dem niedrigsten Schleudergang kurz schleudern.
Trocknen:	Das Kissen aus dem Schonbezug nehmen und vollständig trocknen lassen. Erst in vollkommen trockenem Zustand das Kissen wieder mit Luft befüllen!

Desinfektion:

Empfohlen wird das Desinfektionsmittel „Laudamonium®“. (erhältlich bei G.Egger) Das Desinfektionsmittel sollte im Verhältnis 1 Liter Laudamonium auf 10 Liter Wasser = 1:10 angewendet werden. Es kann auch eine Lösung aus 125ml flüssigem Bleichmittel auf 1l Wasser verwendet werden. Sorgen Sie dafür, dass das saubere Kissen 10 Minuten lang von der Bleichmittellösung benetzt bleibt.

Sterilisation:

Für den Privatgebrauch ist eine Sterilisation nicht notwendig. Ist eine Sterilisation notwendig, sollte diese nicht über 93°C erfolgen, da höhere Temperaturen das Produkt beschädigen könnten. Dabei ist das Ventil zu öffnen und die Sterilisation mit der niedrigstmöglichen Temperatur und in der kürzestmöglichen Zeit durchzuführen. Gassterilisation sollte der Dampfsterilisation bevorzugt werden.

Wichtig:

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion keine ölhaltigen Substanzen, Lanolin und Desinfektionsmittel auf Phenolbasis, die das Material beschädigen könnten.

Das ROHO Kissen ist nur mit Bezug zu verwenden. Auf eine ROHO Matratze kommt üblicherweise ein Spanneintuch, darunter kann noch ein Inkontinenzbezug verwendet werden.

Nie mit nackter Haut auf dem Kissen sitzen oder auf der Matratze liegen! Bei direktem Kontakt können die Pflegeprodukte der Haut die Oberfläche des ROHO Produktes beschädigen.

Bei weiteren Fragen zur Reinigung Ihres ROHO Produkts, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne. Ihr **GEORG EGGER** Team. (Tel.: 0316 / 71 51 68)

