



Die Lunge beginnt an der Nasenspitze

... mit der
RC-Cornet® PLUS Familie

RC PLUS
CORNET®


Die Lunge beginnt an der Nasenspitze

Die Atemtherapie stellt einen wichtigen Baustein bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen der unteren und oberen Atemwege dar. Die Befreiung von Schleim ist bei Asthma, COPD, Mukoviszidose sowie chronischer Sinusitis die zentrale Herausforderung.

Das RC-Cornet® PLUS befreit die unteren Atemwege sanft von Schleim, reduziert Husten und Atemnot. Mit dem RC-Cornet® PLUS NASAL können auch die oberen Atemwege therapiert werden. Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.

Mit dem integrierten Vernebleranschluss ist die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie bei allen Varianten der RC-Cornet® PLUS Familie möglich. Dies verbessert die Medikamentendeposition und reduziert die Behandlungsdauer. Besonders bei Patienten mit Tracheostoma kann die Kombinationstherapie mit dem RC-Cornet® PLUS TRACHEO eine Verbesserung des Weaningprozesses sowie des Sekretmanagements bewirken.

Die Atemtherapie mit der RC-Cornet® PLUS Familie entspricht höchsten klinischen Anforderungen bezüglich Anwendung und Hygiene. Zudem belegen Studien*, dass die regelmäßige Atemtherapie mit der RC-Cornet® PLUS Familie den Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte bei COPD signifikant reduziert.

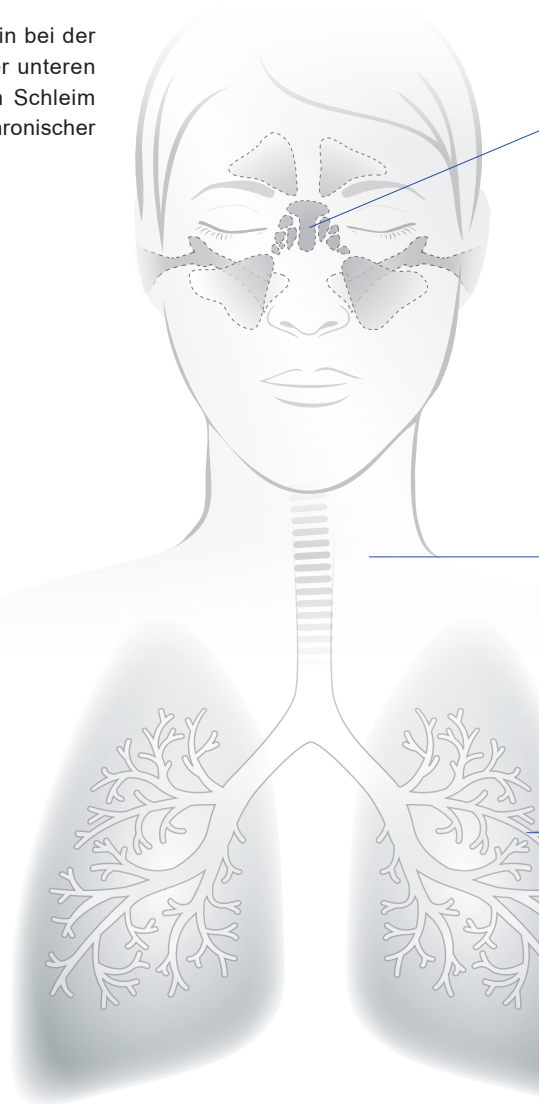

*Studien auf Anfrage erhältlich.



Löst Schleim in den oberen Atemwegen.

RC-Cornet® PLUS NASAL

- Linderung von Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- Hilft bei Nasenspraysucht (Privinisismus)
- Verbessert die Belüftung von Nasennebenhöhlen und Mittelohr

Artikel-Nr. 2680 | PZN 4742253



UVP € 82,50 inkl. MwSt.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 50505 029



Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot.

RC-Cornet® PLUS TRACHEO

- Mobilisation und Lösung von festsitzendem Bronchialschleim
- Verbesserung des Gasaustauschs

Artikel-Nr. 2690 | PZN 4742276



UVP € 74,50 inkl. MwSt.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 50505 027

RC-Cornet® PLUS

- Mobilisation und Lösung von festsitzendem Bronchialschleim
- Ermöglicht auch Patienten mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion die Atemtherapie
- Reduziert Husten und Atemnot

Artikel-Nr. 2600 | PZN 4742247



UVP € 74,50 inkl. MwSt.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 50505 028




Das Wirkprinzip und die Gebrauchsanweisung sind als Video unter www.cegla.de verfügbar.





Freie Nase – ohne Medikamente

Das RC-Cornet® PLUS NASAL befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim. Die Schleimhaut kann sich so bei regelmäßiger Anwendung wieder regenerieren. Die Nase wird besser belüftet und spürbar freier* – ganz ohne den Einsatz von Medikamenten. Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.

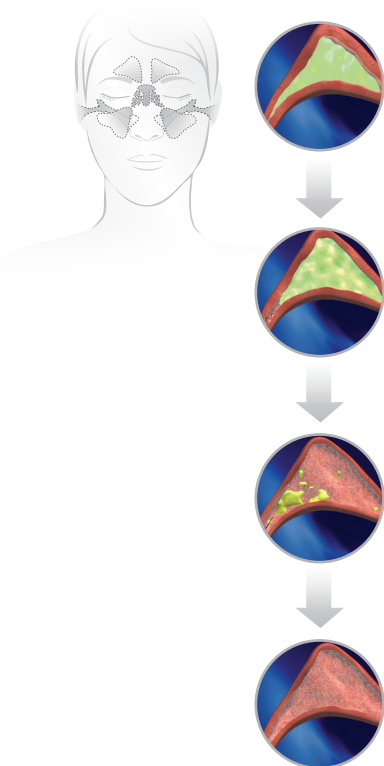

Ausgangssituation

Angeschwollene Schleimhaut, Verengungen und Verlegungen, dadurch bedingtes Druckgefühl.

Einstellung 1: Weitung der Atemwege durch Verflüssigung des Sekrets

Bei der Ausatmung durch das RC-Cornet® PLUS NASAL kommt es zu einem vibrierenden Luftdruck. Die Atemwege werden geweitet. Dieser Druck öffnet Verengungen und die Vibrationen verflüssigen das Sekret.


Mittelstellung: Mobilisation von Sekret

Der mobilisierende Ausatemdruck mit Vibrationen schert die starken Verschleimungen von den Höhlenwänden und verflüssigt diese. Der gelöste Schleim kann effektiv und einfach geschluckt werden. Die Anfälligkeit für Infekte wird gesenkt.

Ergebnis

Abschwellen der Schleimhaut und Verbesserung der Nasenatmung durch Entfernen des Sekrets aus den oberen Atemwegen.

INFO

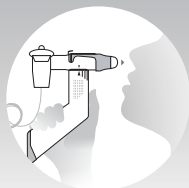

Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern effektiv kombinieren

Der integrierte ISO-genormte 22-mm-Vernebleransatz der RC-Cornet® PLUS Familie ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse.

* bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar



Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot

Die RC-Cornet[®] PLUS Familie nutzt die gesamte Ausatemluft zur effektiven Reinigung der Atemwege. Selbst sehr schwache Patienten können die Therapie nutzen. Das RC-Cornet PLUS[®] hat 2 Einstellungen mit je 4 Widerständen, beginnend ab einem Ausatemdruck von 5 cm H₂O. Bei Patienten mit Tracheostoma ermöglicht das RC-Cornet[®] PLUS TRACHEO eine Atemtherapie über eine 15-mm-Kanüle (Tubus).

Ausgangssituation

Verengte und durch Schleim verstopfte Bronchien.

Einstellung 1: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege.


Verengungen werden geöffnet und somit Teile der Lungenbläschen wieder belüftet. Dies reduziert Atemnot und Überblähungen.

Einstellung 2: Mobilisierender Ausatemdruck zur Reduktion von Husten.


Der mobilisierende Ausatemdruck mit Vibrationen löst die starken Verschleimungen von den Bronchialwänden und verflüssigt diese. Der gelöste Bronchialschleim kann effektiv und einfach abgehustet werden. Die Anfälligkeit für Infekte wird gesenkt.

Ergebnis

Reduktion von Atemnot und Husten durch Schleimlösung sowie Verbesserung des Gasaustausches.

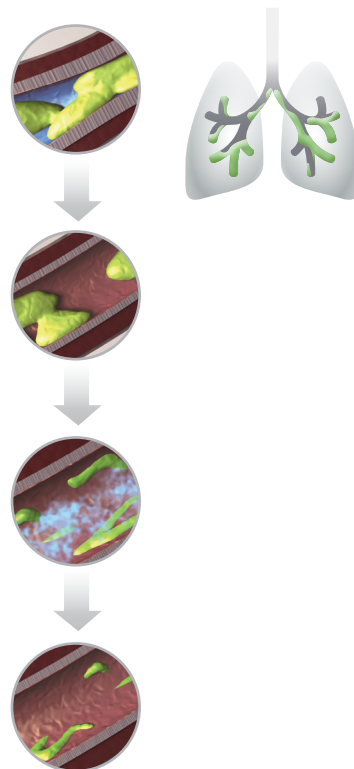

Medikamente oder isotonische Kochsalzlösung können so schneller und effektiver in die Atemwege eingebracht werden. Die Therapiedauer der oberen und unteren Atemwege wird verkürzt. Die Medikamentendeposition verbessert sich.

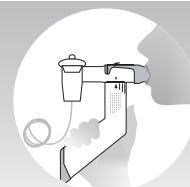

Das RC-Cornet® PLUS Baukastensystem ermöglicht den Umbau eines jeden Basis-Produktes (RC-Cornet® PLUS, RC-Cornet® PLUS NASAL, RC-Cornet® PLUS TRACHEO) in alle anderen Produkte der RC-Cornet® PLUS Familie. Zur Umrüstung werden nur die entsprechenden Zubehörartikel benötigt.



	Produktbild	Produktname
obere Atemwege		RC-Cornet® PLUS NASAL
		RC-Cornet® PLUS NASAL SET (Nasenolive und Winkelstück)
Tracheostomie		RC-Cornet® PLUS TRACHEO
		RC-Cornet® PLUS Tracheoansatz
untere Atemwege		RC-Cornet® PLUS
		RC-Cornet® PLUS Mundstück
		RC-Cornet® PLUS Zusatzmundstück oval



Das Wirkprinzip und die Gebrauchsanweisung sind als Video unter www.cegla.de verfügbar.



Beschreibung / Funktion*	PZN	Artikel-Nr.	Hilfsmittel- Positions-Nr.
Befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim – ohne Medikamente	4742253	2680	50505 029
Zum Umrüsten des RC-Cornet® PLUS auf das RC-Cornet® PLUS NASAL. Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	4747747	2683	
Starke Verbesserung des Weaningprozesses und des Sekretmanagements durch gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie	4742276	2690	50505 027
Zum Umrüsten des RC-Cornet® PLUS auf das RC-Cornet® PLUS TRACHEO. Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	4747724	2621	
Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	4742247	2600	50505 028
Zum Umrüsten auf das RC-Cornet® PLUS, Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	4747718	2620	
Für Schlaganfall- oder neuromuskuläre Patienten geeignet	5304420	2622	

* Alle beiliegenden Gebrauchsanweisungen sind multilingual.

Weiteres Informationsmaterial und Videos sind in verschiedenen Sprachen unter www.cegla.de verfügbar.

Ergänzende Produkte

Peak-Flow-Meter Personal Best® FR

Asthma und COPD
einfach und sicher im Blick!

- Zur manuellen Kontrolle der Atemwegsweite für Erwachsene und Kinder
- Misst den Ausatemspitzenfluss (PEF), von dem auf die „Weite“ der Bronchien geschlossen werden kann
- Full-Range-Skala von 60-800l/min
- Skala in 10er-Schritten
- Geeignet für Erwachsene und Kinder

Artikel-Nr. 135 | PZN 4741905




UVP € 34,33,- inkl. MwSt.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 50505 025

RC-Cornet® PLUS

Ersatzventilschlauch 2er Set

Artikel-Nr. 2660 | PZN 4747693

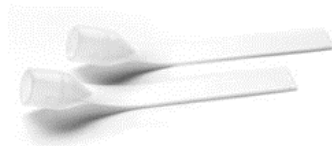

UVP € 12,- inkl. MwSt.

Hilfsmittel-Positions-Nr. 50505 030

Ihr Fachhändler:



CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Weitere Informationen und
Anwenderfilme finden Sie
unter: www.cegla.de



Copyright 2018 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen R. Cegla GmbH & Co. KG.
Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.