

Ihr Hersteller in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
A-8053 Graz

Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger/qufora

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. © 02/2025.
Alle Rechte vorbehalten. Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.



24413-01_170225



Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.
Sprechen Sie Ihren Arzt oder das einweisende medizinische Fachpersonal an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Qufora® IrriSedo MiniGo

Kurzanleitung


Rektalkonus



Handpumpe




So verwenden Sie Qufora IrriSedo MiniGo

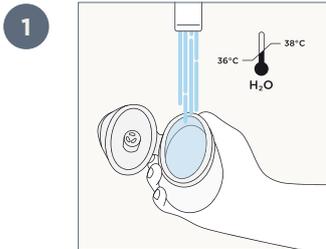


Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie die Handpumpe bis zum Innenrand mit körperwarmem Wasser (36°-38° C), indem Sie die Handpumpe mit geöffnetem Deckel unter den Wasserhahn halten.




Wenn die Handpumpe bis zum Innenrand gefüllt ist, schließen Sie den Deckel durch Drücken bis Sie ein Klick vernehmen.

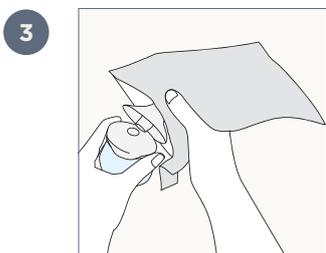


Öffnen Sie den Konusbeutel an der Perforationsmarke. Drücken Sie den Konus fest in die kleine runde Öffnung am Deckel, während sich der Konus noch im Beutel befindet.

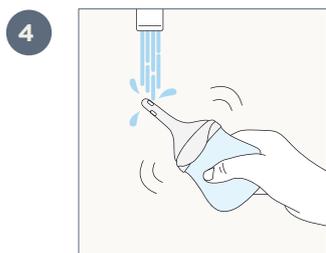


Um das Gleitmittel (hydrophile Beschichtung) auf dem Konus zu aktivieren, befeuchten Sie diesen einige Sekunden vollständig mit Wasser. Drücken Sie die Handpumpe leicht zusammen, bis Wasser aus dem Konus austritt, um die Luft zu entfernen. Das System ist nun einsatzbereit.

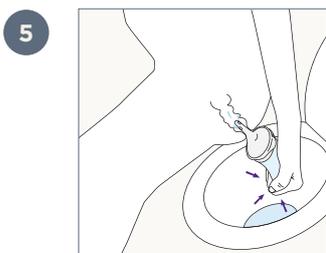

Setzen Sie sich auf oder über die Toilette. Führen Sie den Konus vorsichtig bis zur Basis in den After ein. Wenn der Konus korrekt platziert ist, drücken Sie vorsichtig die Pumpe, um Wasser in das Rektum einzuspülen.

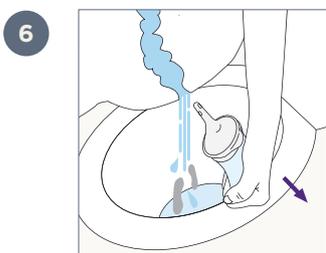

Entfernen Sie den Konus aus dem Rektum. Stuhl und Wasser entleeren sich in die Toilette.

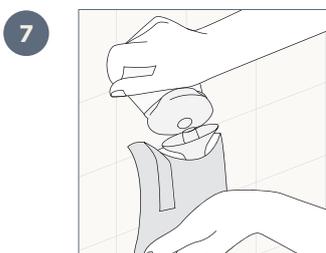

Legen Sie den gebrauchten Konus zurück in den Konusbeutel und trennen Sie diesen von der Handpumpe. Der Konusbeutel kann zusammengefasst und mit der Klebefläche verschlossen werden, um dann im Restmüll entsorgt zu werden.

Der Konus ist zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

i

Mit der Zeit werden Sie Ihre individuelle Handhabung des MiniGo entwickeln

i

Die Abbildung zeigt das Einführen des Konus von hinten, indem Sie nach hinten greifen, um ihn in den After zu führen. Um die für Sie bequemste Position zu finden, können Sie den Konus auch von vorne einführen, indem Sie ihn zwischen Ihren Beinen hindurch in den After einführen.

Reinigung und Lagerung

Entleeren Sie die Handpumpe. Reinigen Sie die Außenseite der weichen Pumpe mit milder Seife und lauwarmem Wasser, spülen Sie sie aus und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch. Lagern Sie die Pumpe mit geöffnetem Deckel.

