

Qufora® IrriSedo MiniGo Flex

Entwickelt für das, worauf es ankommt!



Darmirrigation für Kinder



reddot winner 2021




Wenn man Bauchweh hat!

Hallo, mein Name ist Isla. Ich habe ein Geheimnis; es soll auch nicht jeder wissen; denn ich habe Probleme mit meinem Bauch. Manchmal, wenn ich in der Schule bin, oder zuhause spiele, drückt es in meinem Bauch so sehr, dass es weh tut! Ich glaube, es ist Aa, Kacka oder wie die Erwachsenen sagen: "Stuhl".

Manchmal kann ich den Stuhl einfach nicht herausdrücken, auch wenn ich mich sehr anstrengt, so fest ist der. Andere Male ist er ganz weich, so dass ich es nicht mehr bis zur Toilette schaffe. Dann ist meine Hose ganz schmutzig und stinkt!

Der Doktor sagt, ich habe ein Problem mit meinem Darm; er funktioniert nicht so gut, wie er sollte. Ich habe Medikamente bekommen, aber es hat mir nicht geholfen.

Ich werde so traurig, wenn es ihr nicht gut geht!

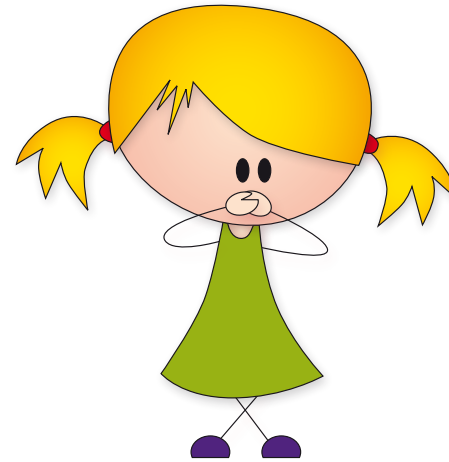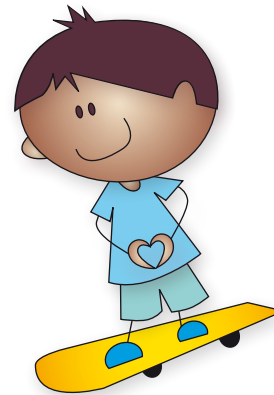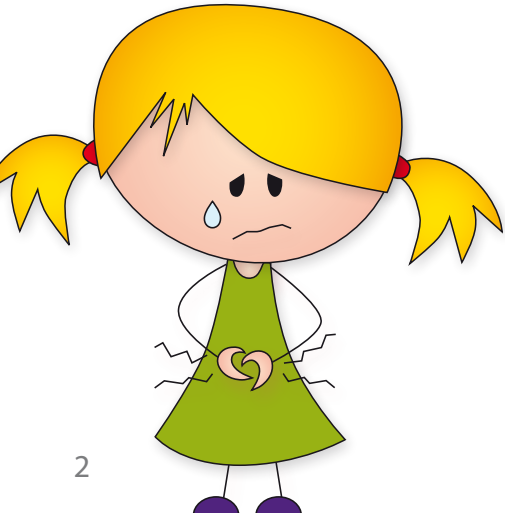

MiniGo Flex kann helfen!

Eines Tages erzählte uns eine Krankenschwester, dass es etwas gibt, was mir bestimmt helfen wird.

Sie sagte, dass es ein tolles Gerät für den Darm gibt. Es heißt MiniGo Flex und funktioniert wie eine kleine Dusche in meinem Popo. Ich muss es nur einmal am Tag machen und kann wählen, ob ich es vor oder nach der Schule mache. Es dauert nur 10-15 Minuten.

Inzwischen benutze ich MiniGo Flex schon eine ganze Weile, und muss mir in der Schule oder beim Spielen mit Freunden keine Gedanken um meinen Darm machen.

Ich fühle mich viel besser, seitdem ich MiniGo Flex benutze! Vor allem, weil ich nun keine Angst vor schmutzigen Windeln oder Unterwäsche haben muss.

Das Beste ist...

Jetzt macht das Spielen mit meiner Familie und meinen Freunden wieder richtig Spaß!




Mit MiniGo Flex beginnen

Den meisten Menschen fällt es sofort leicht, ein Spülsystem (auch Irrigationssystem genannt) wie MiniGo Flex zu verwenden. Andere müssen ein bisschen üben, bevor es funktioniert.

Meine Krankenschwester sagte mir, es sei wichtig, dass ich Geduld habe und weitermache. Sie werde mich weiterhin unterstützen.

Mit dem MiniGo Flex kann man auch ganz toll in der Badewanne oder am Waschbecken spielen! Das macht viel Spaß und so habe ich ganz schnell rausgefunden, wie es funktioniert ...

... einfach mit Wasser befüllen und wieder rausspritzen!

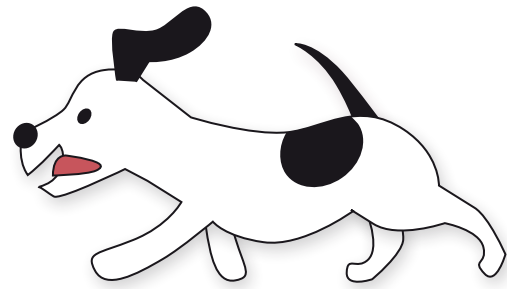

Wie sieht MiniGo Flex aus?


Der zusammengerollte Schlauch macht Spaß, er wird länger, wenn man den Konus einführt, und rollt sich wieder ein, wenn man ihn herausnimmt.

Ein schöner, glatter Konus, aus dem das Wasser sanft wie aus einer Dusche kommt.

Einfach den Konus in Wasser tauchen, bevor du ihn verwendest, damit es beim Einführen besser rutscht.

Eine weiche Pumpe, die du mit Wasser befüllst.

Einen Beutel, damit du den gebrauchten Konus nach der Anwendung einfach wegwerfen kannst.

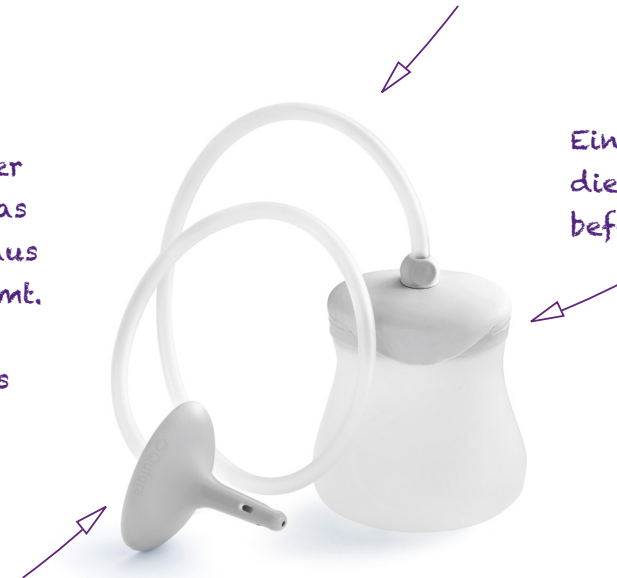



Wie benutze ich MiniGo Flex?

Wenn du MiniGo Flex nicht selbst halten kannst, helfen dir deine Eltern, Wasser in den Darm zu spülen. Das Wasser wird helfen, den Kacka aus dem Popo herauszubekommen.




Was passiert, wenn ich den Konus herausnehme?

Nimm dir ein bisschen Zeit.



Warte 10-15 Minuten!
Wasser und Kacka kommen dann aus deinem Popo.

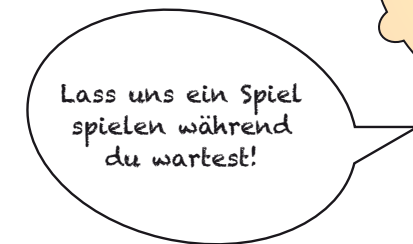

Wichtige Informationen (auch für deine Eltern)

Was ist, wenn beim Drücken der Handpumpe ein Geräusch zu hören ist?

Das ist ein cleveres Geräusch, das MiniGo Flex macht. Es soll dich daran erinnern, es vor der Verwendung bis ganz oben mit Wasser zu befüllen.

Täglich

Du solltest MiniGo Flex täglich oder so oft verwenden, wie es dein Doktor oder deine Krankenschwester (Fachkraft) empfiehlt. Denkt daran, den Konus nach der Anwendung wegzuschmeißen. Er darf nur einmal benutzt werden. Die Handpumpe kannst du bis zu 30 Mal verwenden (entspricht 1 Monat).

Medikamente nicht absetzen

Bitte nimm deine Medikamente weiter ein wie bisher, es sei denn, dein Doktor hat was anderes gesagt. Dies kann weiterhin notwendig sein, bis der Darm sich an die Darmspülung gewöhnt hat.



Nicht aufgeben - weitermachen

Trinken

Achte immer darauf, dass du genug trinkst. Ansonsten kann es passieren, dass das Wasser für die Spülung im Darm bleibt und du kein Kacka machen kannst.

Hartnäckig sein

Gib nicht auf, wenn der Darm nicht auf Anhieb so reagiert, wie du es möchtest. Mit der Zeit klappt die Darmspülung immer besser und du fühlst dich sicherer.

Dann kannst du ganz schnell wieder Zeit mit deinen Freunden verbringen!



So funktioniert MiniGo Flex!

Bevor du es verwendest


Lies bitte die Anleitung mit deinen Eltern oder einer anderen vertrauten Person durch. Legt die Handpumpe und den Konus bereit, am besten in der Nähe eines Waschbeckens, wo es warmes Wasser gibt.

Du kannst dich ein wenig nach vorne lehnen, wenn du auf der Toilette sitzt. So kommt das Kacka leichter heraus.

Wichtig!

Vor der ersten Anwendung solltest du von einer geeigneten Fachkraft ausführlich untersucht und eingewiesen werden.


Irrigationsverlauf (deine Eltern oder eine Fachkraft helfen dir gerne)

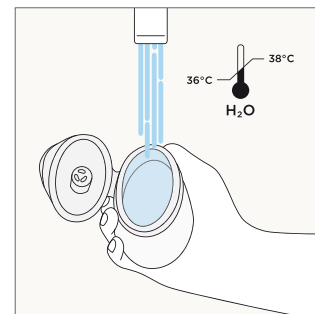


1. Öffne den Deckel und fülle die Handpumpe bis zum Innenrand mit körperwarmem Wasser (36-38° C), indem du die Handpumpe mit geöffnetem Deckel unter den Wasserhahn hältst.



2. Wenn die Handpumpe bis zum Innenrand gefüllt ist, schließt du den Deckel durch Drücken, bis du ein Klick hörst.

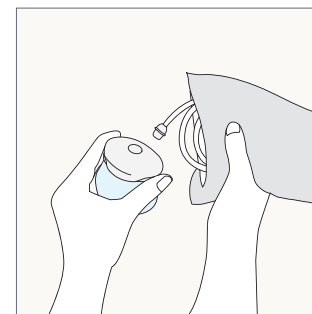

3. Öffne den Konusbeutel und stecke das Ende des Schlauchs fest in die kleine runde Öffnung am Deckel der Pumpe. Achte darauf, dass der Konus im Beutel bleibt und du ihn nicht berührst.

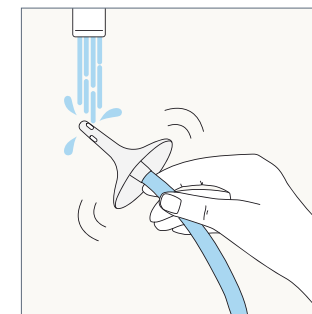

4. Um die gleitfähige Beschichtung auf dem Konus glitschig zu machen, befeuchte diesen einige Sekunden vollständig mit Wasser. Drücke die Handpumpe leicht zusammen, bis Wasser aus den Konusöffnungen austritt, um die Luft zu entfernen. Das System ist nun einsatzbereit.




Mit der Zeit wirst du deine individuelle Handhabung des MiniGo Flex entwickeln.




Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beiliegt.


Irrigationsverlauf (deine Eltern oder eine Fachkraft helfen dir gerne)

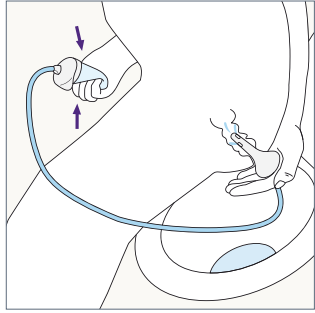

5. Setz dich auf oder stell dich über die Toilette. Führe vorsichtig den Konus bis zur Basis in deinen Popo ein. Wenn der Konus korrekt platziert ist, drückst du vorsichtig die Pumpe, um Wasser in deinem Darm einzuspülen.

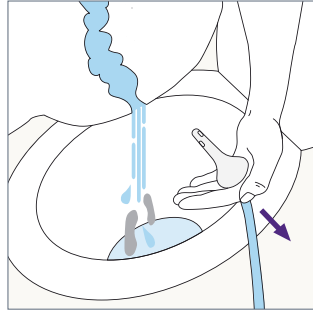

6. Zieh den Konus wieder aus dem Popo heraus. Stuhl und Wasser laufen in die Toilette.

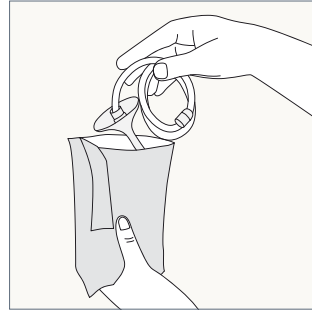

7. Gebe den gebrauchten Konus zurück in den Konusbeutel und trenne ihn von der Handpumpe. Der Konusbeutel kann zusammengefaltet und mit der Klebefläche verschlossen werden, um danach im Restmüll entsorgt zu werden.

Der Konus darf nur einmal benutzt werden und sollte nicht wiederverwendet werden.



i

Die Abbildung zeigt das Einführen des Konus von hinten, indem du nach hinten greifst, um ihn in den After zu führen. Um die für dich bequemste Position zu finden, kannst du den Konus auch von vorne einführen, indem du ihn zwischen deinen Beinen hindurch in den After einführst.



Reinigung und Lagerung

Leere die Handpumpe vom Wasser.

Reinige die Außenseite der Handpumpe mit milder Seife und lauwarmem Wasser, spüle sie aus und trockne sie mit einem fusselfreien Tuch.

Lagere die Pumpe mit geöffnetem Deckel.

Was, wenn...

Gib deinen Eltern und deiner Krankenschwester Bescheid, wenn etwas nicht stimmt!

Was ist, wenn das Wasser während des Pumpens wieder ausläuft?

Versuche den Konus fest gegen deinen Popo zu drücken, auch während du das Wasser in den Darm einpumpst.

Was ist, wenn kein Wasser austritt, nachdem ich den Konus herausgezogen habe?


Warte zunächst einige Minuten. Es kann helfen, zu husten oder deinen Bauch leicht zu massieren, um den Stuhl in Bewegung zu setzen. Achte immer darauf, genug zu trinken. Wenn es nicht besser wird, sag deinem Doktor Bescheid.

Was mache ich, wenn nach der Irrigation weiterhin Stuhl herauskommt?

Dies kann passieren, wenn man gerade mit der Irrigation angefangen hat. Es sollte aber jedes Mal besser werden. Wenn es nicht besser wird, sag deinem Doktor Bescheid. Vielleicht muss dann die Wassermenge für die Irrigation angepasst werden.

Was ist, wenn das Leitungswasser nicht zum Trinken geeignet ist?



Dann kannst du auch Wasser in Flaschen oder abgekochtes Wasser (vorher abkühlen lassen) für die Irrigation verwenden.

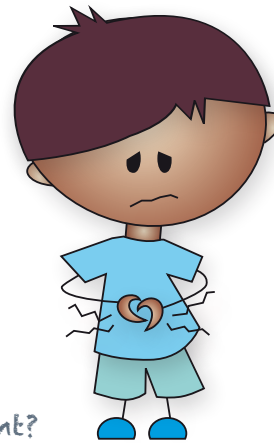

Was ist, wenn es beim Einführen des Konus weh tut?

Beim Einführen des Konus in den Popo kann es leicht bluten. Wenn du starke Bauchschmerzen hast und dein Popo wund ist, sollten du und deine Eltern so schnell wie möglich einen Doktor aufsuchen.

Deshalb muss der Konus immer vor dem Gebrauch in Wasser getaucht werden, damit er glitschig wird. Du solltest den Konus langsam und sanft in den Popo einführen. Versuche dich zu entspannen, während du den Konus einführst.

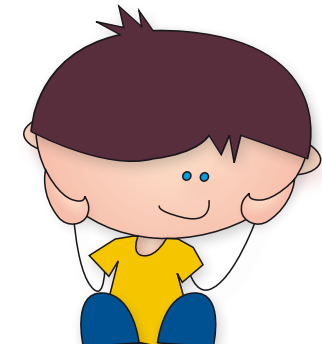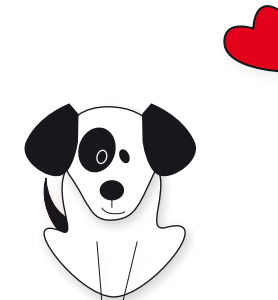



Und nun noch ein paar Infos für deine Eltern!

Verordnung

Vor der ersten Anwendung solltest du von einer geeigneten Fachkraft ausführlich untersucht und eingewiesen werden.

Die Fachkraft legt gemeinsam mit dir und deinen Eltern fest, wie oft du MiniGo Flex verwenden solltest (täglich oder alle zwei Tage) und wann du die Irrigation durchführen solltest.

An diese Fachkraft können sich du und deine Eltern immer wenden, wenn du Fragen hast und Unterstützung benötigt.

Erstattung

Das Qufora IrriSedo MiniGo Flex ist ein medizinisches Hilfsmittel und im Tarifkatalog der zuständigen Kassen gelistet. Es kann von einer

Alle Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral in weiblicher, männlicher und diverser Form zu verstehen.

ärztlichen Fachkraft verordnet und die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

Bezug

Sie erhalten Qufora IrriSedo MiniGo Flex nach der ärztlichen Verordnung durch Ihren Hausarzt beim Vertragspartner der zuständigen Kassen (Fachhändler, Bandagisten).

Welche Verpackungseinheiten von MiniGo Flex brauche ich pro Monat?

Täglicher Gebrauch:
1 Basisset 30



Hinweise für die ärztliche Verordnung

Das Qufora IrriSedo MiniGo Flex muss auf einer separaten ärztlichen Verordnung verordnet werden. In dem Verordnungsfeld sollte Folgendes vermerkt werden:

a) Produkt

Die Qufora IrriSedo Irrigationssysteme gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Für Details siehe Tabelle auf Seite 19.

b) Irrigationshäufigkeit


Weiterhin sollte die Irrigationshäufigkeit und die Produktmenge (Stückzahl oder Verpackungseinheit) auf der ärztlichen Verordnung vermerkt sein, z.B. „Irrigationshäufigkeit: „jeden Tag“ oder „jeden 2. Tag“.

c) Versorgungszeitraum

Der Versorgungszeitraum sollte auf der ärztlichen Verordnung angegeben werden, z.B. „April 2025“ oder „01.04 bis 30.06.2025“ bzw. „2. Quartal 2025“.

d) Diagnose und Begründung

Mögliche Diagnosen sind eine chronische Verstopfung oder chronische Stuhlinkontinenz. Beispiele für die Begründung: „Wegen Inkontinenz zur Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben“ oder „Chronische Obstipation aufgrund neurogener Darmfunktionsstörung“.

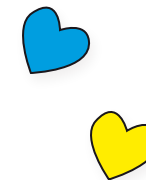

Das Qufora IrriSedo MiniGo Flex besitzt eine Hilfsmittelpositionnummer und ist erstattungsfähig



- 1 Angabe der Krankenkasse
- 2 Name, Adresse, Versicherungsnummer und Geburtsdatum des/der Versicherten
- 3 Ausstellungsdatum der ärztlichen Verordnung und Unterschrift und Stempel der Vertragsärztin/des Vertragsarztes
- 4 Angaben zur Versorgung
 - a) Produktname/Menge/Hilfsmittelpositionnummer
 - b) Irrigationshäufigkeit
 - c) Versorgungszeitraum
 - d) Diagnose und Begründung
- 5 Das Feld 7 “Hilfsmittel” muss angekreuzt werden

Musterverordnung
Monatsversorgung

Formular für Monatsversorgung (Verordnung für Heilbehelfe und Hilfsmittel). Felder sind mit Nummern 1 bis 5 markiert, die den Schritten 1 bis 5 entsprechen.

Quartalsversorgung

Formular für Quartalsversorgung (Verordnung für Heilbehelfe und Hilfsmittel). Felder sind mit Nummern 1 bis 5 markiert, die den Schritten 1 bis 5 entsprechen.

Qufora IrriSedo MiniGo Flex Bestellinformationen

REF	Produktbeschreibung	Positionsnummer
57006-030	Basiset MiniGo Flex 30 1 Handpumpe, 180 ml, 30 Rektalkonen	50781 017
57016-030	Basiset MiniGo Flex, small 30 1 Handpumpe, 180 ml, 30 Rektalkonen	50781 017

Anwendungsdauer des Qufora IrriSedo MiniGo



Weiche Handpumpe
30 Anwendungen
(entspricht 1 Monat Nutzungsdauer*)




Konus für MiniGo Flex
in zwei Größen
Zum einmaligen Gebrauch bestimmt

* bei täglicher Irrigation.

Kontakt:

Ihr Herstellervertreter in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH
Kapellenstraße 105
A-8053 Graz

Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger.at/qufora

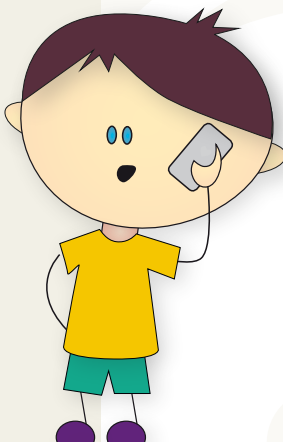

Ihr Fachhandelspartner
in der Region



Hersteller: Qufora A/S, Gydevang 28-30, 3450 Allerød, Dänemark

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. © 02/2025.
Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.