


Gebrauchshinweise

Qufora® IrriSedo Konus



- 1 Wasserbehälter
- 2 Rektalkonus mit Gleit-mittelbeschichtung zur Einmalverwendung
- 3 Handpumpe

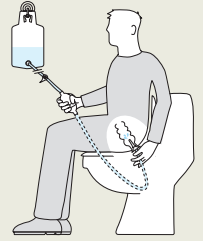

Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.

Sprechen Sie Ihren Arzt oder das einweisende medizinische Fachpersonal an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Kontakt

Ihr Herstellervertreter in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH


Kapellenstraße 105
A-8053 Graz
Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger.at/qufora

 **Qufora®**
Your life. Our inspiration.

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. © 02/2023. Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.


Qufora IrriSedo Konus

1

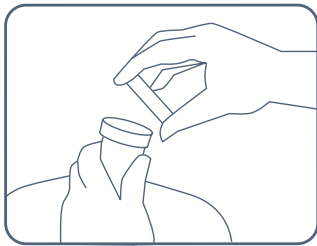


Füllen Sie den Wasserbehälter mit warmem Leitungswasser (36-38°C) bis zum festgelegten Füllstand.

2

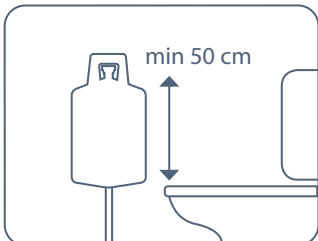


Befestigen Sie den Saugnapf ca. 50 cm über der Toilette und hängen Sie den Wasserbehälter daran auf.

3

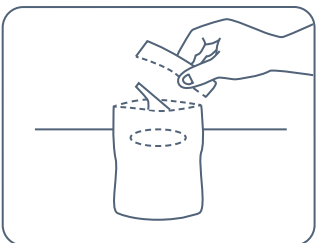


Öffnen Sie den violetten Beutel an der Perforationsmarke. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Beutel auf einer trockenen Oberfläche.

4

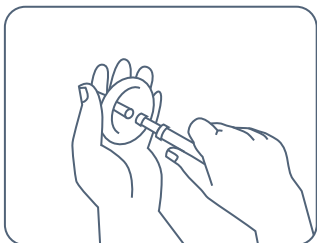


Verbinden Sie den Konus mit dem violetten Anschluss des Wasserbehälters.

5

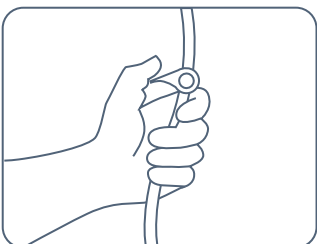


Öffnen Sie das Ventil und pumpen Sie Wasser in das System, bis das Wasser aus dem Konus läuft. Danach schließen Sie das Ventil wieder.

6

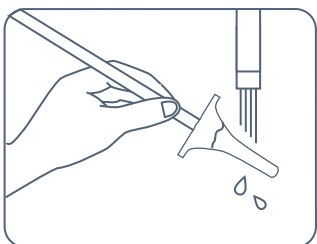


Befeuchten Sie den Konus mit Wasser, um die hydrophile Beschichtung zu aktivieren. Das System ist nun einsatzbereit.

7

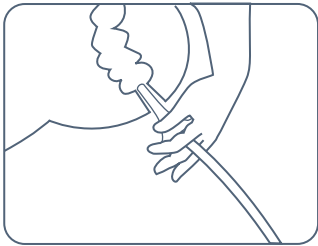


Führen Sie auf der Toilette sitzend vorsichtig den Konus ein.

8

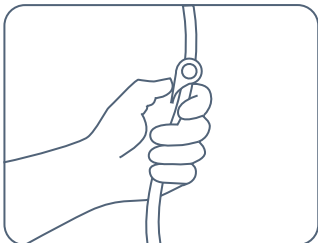


Pressen Sie mit einer Hand den Konus gegen den After und öffnen Sie mit der anderen Hand das Ventil.

9

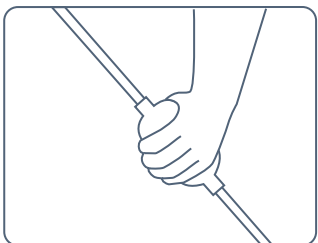


Pumpen Sie das Wasser langsam und gleichmäßig in den Darm. Bei Erwachsenen hat sich eine Wassermenge von ungefähr 300-500 ml bewährt.

10

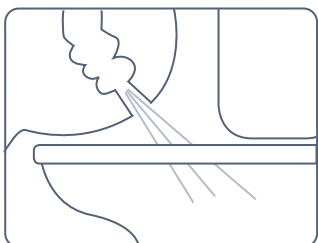


Schließen Sie das Ventil. Entfernen Sie den Konus nach einer kurzen Wartezeit und entleeren Sie den Darm möglichst vollständig.

11

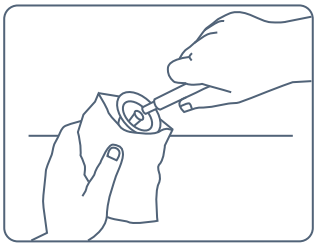

Stecken Sie den Konus in den violetten Beutel, trennen Sie ihn mit einer Drehbewegung vom Schlauch und entsorgen Sie diesen im Restmüll.

12

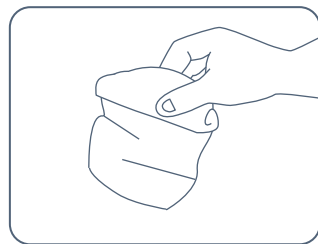

Reinigen Sie die Handpumpe und den Wasserbehälter mit Wasser und lassen Sie diese trocknen.

Reinigung und Lagerung Entleeren Sie alle Bauteile vom Wasser. Reinigen Sie die Oberfläche des Konus Systems mit einer milden Seifenlauge und Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und Hitze. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.



Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchshinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.