



Die Lunge ist ein Wunder

Produktübersicht
2019

Leichter Atmen mit Produkten von CEGLA

Die Lunge ist ein Wunder. Sie lässt uns wie selbstverständlich ein- und wieder ausatmen. Wer an Atemwegserkrankungen leidet, weiß jedoch, dass dies nicht selbstverständlich ist.

CEGLA Medizintechnik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Atemwegserkrankten durch einfache, sichere und hygienische Hilfsmittel mehr Lebensqualität zu verschaffen. Durch unsere Baukastensysteme ermöglichen wir es den Anwendern – Fachpersonal wie auch Patient –, oft nur durch einen Handgriff unsere Produkte auf die gerade vorliegenden Bedürfnisse auszurichten.

Unser Familienunternehmen bietet weltweit seit über 30 Jahren Hilfsmittel und Produkte für die Behandlung von Erkrankungen der Atemwege an. Die Produktwelt von CEGLA Medizintechnik ist für das häusliche wie das klinische Umfeld geeignet.

Deshalb sind wir sehr glücklich, Ihnen auf den folgenden Seiten unsere neuesten Entwicklungen, die in enger Zusammenarbeit mit Therapeuten, Ärzten und Patienten entstanden sind, vorzustellen.

Helpfen Sie uns, damit wir Ihnen helfen können!

Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Wünsche mit unter:

Telefon: +49 2602 9213-0

E-Mail: info@ceгла.de

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team von CEGLA Medizintechnik



Produkte sind erhältlich im Online-Shop unter www.ceгла-shop.de sowie in Apotheken und Sanitätshäusern.

Atemtherapie	
RC-Cornet® PLUS + ADAPTER	6
RC-Cornet® PLUS TRACHEO + ADAPTER	8
RC-Cornet® PLUS NASAL	10
RC-Cornet® (Basiscornet)	12
RC-Cornet® N (Nasencornet)	13
Threshold® IMT + ADAPTER	14
PEP-Maske	15
Inhalationstherapie	
Mit Sicherheit Leichter Atmen	18
RC-Chamber® (vormals RC Space Chamber Compact plus®)	20
Hygiene	
RC-Clean	24
Produkte, Zubehör und Ersatzteile	
Produkte, Zubehör und Ersatzteile zum Heraustrennen	I–IV
Messtechnik	
RC-Test Asthma	30
RC-Test COPD	31
Peak-Flow-Meter Personal Best® FR	32
Peak-Flow-Meter Personal Best® LR	33
Sauerstofftherapie	
Nasal-/Oral-Brille (vormals OxyNASOR)	35
RC-Sauerstoffnasenbrille	36
Swivel Verbindungsstücke	37
Pflege	
RC-Pflege Lotion & Creme	39
RC-Gel NASAL	40
RC-Pflege® N	41
RC-RHINO HORN™	42
RC-RHINO HORN™ JUNIOR	43
Produkte für Klinik, außerklinische Beatmung & tracheotomierte Patienten	
RC-Cornet® PLUS TRACHEO	45
RC-Chamber reusable	46
RC-Maske Tracheostoma – für RC-Cornet® PLUS, RC-Cornet® und RC-Chamber® / RC Space Chamber Compact plus®	47
CombiHaler® Solo + ADAPTER	48
CombiHaler® + ADAPTER	49
Sonstiges	
CEGLA Service Portal – Video Mediathek	50
Das Online-Gesundheitsportal – www.leichter-atmen.de	51

Moderne Atemtherapie-
geräte für die Reinigung
und Pflege der oberen
und unteren Atemwege





RC-Cornet[®] PLUS

Atemtrainer für die unteren Atemwege

Studien belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet[®] PLUS Therapie den Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte signifikant reduziert.¹⁾

Produktmerkmale:

- Mobilisation und Lösung von feststehendem Bronchialschleim
- Verbesserung des Gasaustausches
- ermöglicht auch Patienten mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion die Atemtherapie
- 2 Einstellungen mit je 4 Widerständen sind auswählbar, beginnend ab einem Ausatemdruck von 5 cm H₂O
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)
- lageunabhängig



3-99

INFO

RC-Cornet[®] PLUS

PZN 12 419 336

Artikel-Nr. 2600

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenspezialarzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013





Der 2in1-Atemtrainer mit (I) oszillierendem positivem Ausatemdruck und (II) hohem Fluss¹




Einstellung I: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege (StabilizingPEP[™])



Einstellung II: Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport (MobilizingPEP[™])²

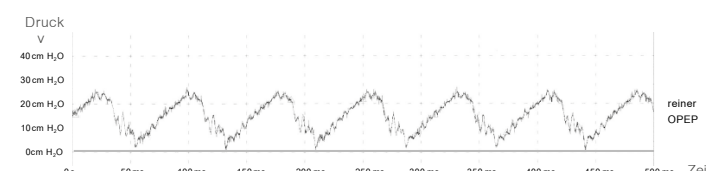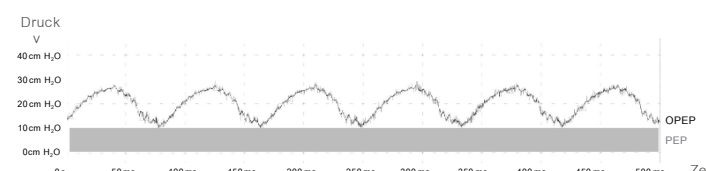


RC-Cornet[®] PLUS Widerstände:

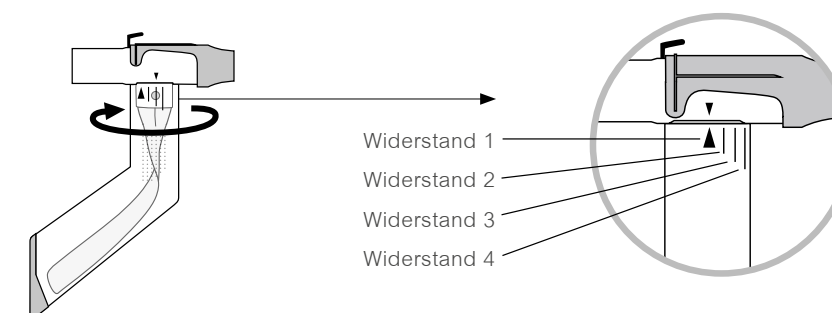

Das RC-Cornet[®] PLUS ermöglicht gerade sehr schwachen (inklusive neuromuskuläre und Schlaganfall-) Patienten die Atemtherapie durch die verschiedenen Widerstände je nach Einstellung sowie die Nutzung der kompletten Ausatemluft. Tipp: Bei tracheotomierten Patienten kann es sinnvoll sein, mit Einstellung II zu beginnen.

Atem- und Inhalationstherapie effektiv kombinieren³

Verbesserung der Medikamentendeposition und Reduktion der Behandlungsdauer

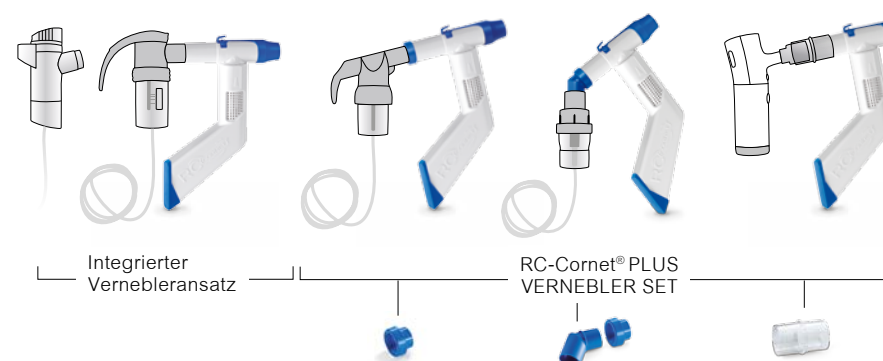

Durch die Weitung der Atemwege in Einstellung I und die gleichzeitige Inhalation über den integrierten Vernebleransatz wird die Therapie noch effektiver.⁴

¹ RC-Cornet[®] PLUS Messungen mit 15cm H₂O CPAP, ² Freitag L, Long WM, Kim CS, Wanner A: Removal of excessive bronchial secretions by asymmetric high-frequency oscillations: <https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappl.1989.67.2.614>, ³ U.H. Cegla, J.-H. Jost, A. Harten, T. Weber / RC-Cornet[®] improves the bronchodilating effect of Ipratropium-bromide (Atrovent[®]) inhalation in COPD patients / Pneumologie 2001, Jahrgang 55, Seite 465-469, ⁴ Depositionsdaten können sich durch die Adapterlösungen ändern. Die RC-Cornet[®] PLUS Familie verfügt über ein integriertes Ausatemventil. Bitte beachten Sie dennoch, auch die individuellen Herstellerinformationen des jeweiligen Verneblers.





RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO

für tracheotomierte Patienten mit Kanüle

Einzigartige manuelle Schleimlösung bei Tracheostomie.


Das RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet^{PLUS}. Über einen integrierten Tracheoansatz (15 mm) ermöglicht das RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO Patienten mit einer Kanüle (Tubus) die Atemtherapie zur Schleimlösung.

Produktmerkmale:



- das RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO bietet die gleichen Produktmerkmale wie das RC-Cornet^{PLUS} (siehe Seite 6)
- speziell für tracheotomierte und sehr schwache Patienten geeignet
- Unterstützung beim Weaning
- integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse

Als Zubehör bieten wir das RC-Cornet^{PLUS} VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an (siehe Seite 7).

- zudem ermöglicht dieses VERNEBLER SET die Adaption eines HME-Filters

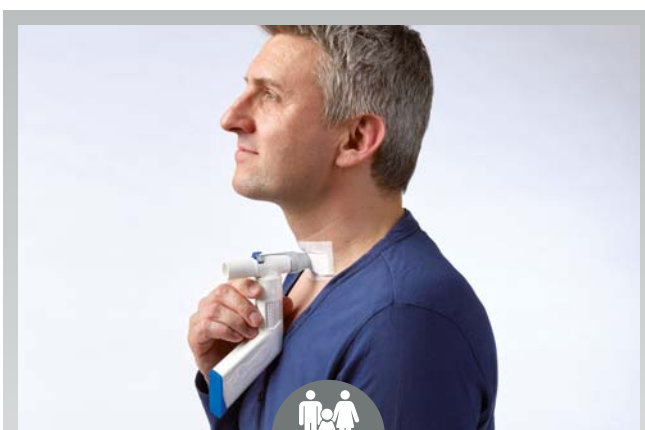


Anwendung bei Patienten mit offenem Tracheostoma

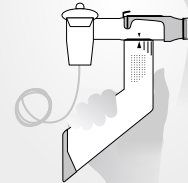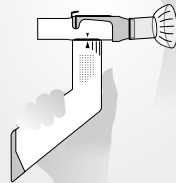

INFO

RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO
PZN 12 441 324
Artikel-Nr. 2690
Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

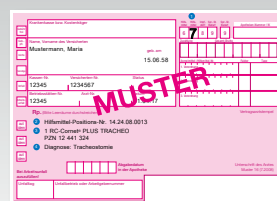

RC-Cornet^{PLUS} Mundstück



a. b.
RC-Cornet^{PLUS} NASAL SET



RC-Cornet^{PLUS} Tracheoansatz

Das Baukastensystem des RC-Cornet^{PLUS}

ermöglicht den Umbau eines jeden Basis-Produktes (RC-Cornet^{PLUS}, RC-Cornet^{PLUS} NASAL oder RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO) in alle anderen Produkte der RC-Cornet^{PLUS} Familie. Für den Umbau werden nur die entsprechenden Zubehörprodukte benötigt.

RC-Cornet^{PLUS} Mundstück

Mit dem Zubehörartikel RC-Cornet^{PLUS} Mundstück kann jedes vorhandene Basisprodukt aus der RC-Cornet^{PLUS} Familie in ein RC-Cornet^{PLUS} für die Therapie der unteren Atemwege umgerüstet werden.

Artikel-Nr. 2620 | PZN 13 348 503

RC-Cornet^{PLUS} Zusatzmundstück oval

Das RC-Cornet^{PLUS} Mundstück oval kann ergänzend auf das Mundstück aufgesteckt werden und u.a. für neurologische Patienten hilfreich sein.

Artikel Nr. 2622 | PZN 13 753 391



RC-Cornet^{PLUS} NASAL SET

Mit dem Zubehörartikel RC-Cornet^{PLUS} NASAL SET kann das RC-Cornet^{PLUS} in ein RC-Cornet^{PLUS} NASAL für die Therapie der oberen Atemwege umgerüstet werden.




In der Regel sollte die Nasenolive (a.) genutzt werden. Das Winkelstück (b.) wird nur bei einer möglichen Inhalationstherapie benötigt.

Artikel-Nr. 2683 | PZN 13 058 202

RC-Cornet^{PLUS} Tracheoansatz

Durch den Zubehörartikel RC-Cornet^{PLUS} Tracheoansatz mit einem ISO-genormten 15 mm-Ansatz kann jedes vorhandene Basisprodukt aus der RC-Cornet^{PLUS} Familie in ein RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO für die Therapie der unteren Atemwege bei tracheotomierten Patienten umgerüstet werden.

Artikel-Nr. 2621 | PZN 13 348 532

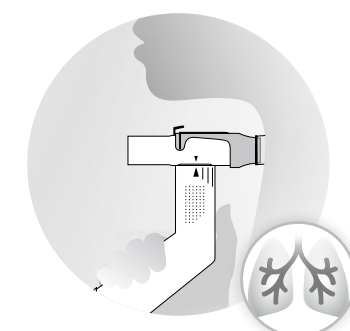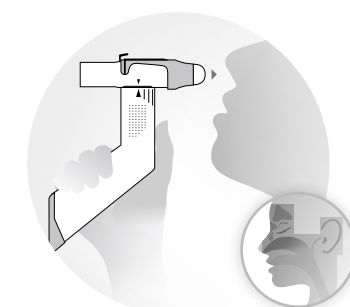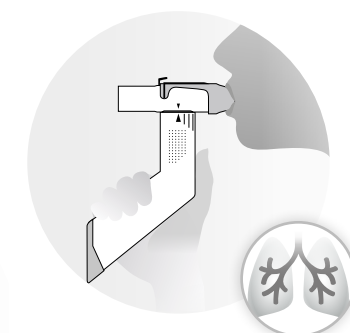



RC-Cornet[®] PLUS NASAL

Effektiv, einfach und gut



Studien belegen¹⁾

- dass die regelmäßige RC-Cornet[®] PLUS NASAL Therapie über 4 Wochen bei 70 von 100 Atemwegspatienten²⁾ zu einer Auflösung der Schleimstraße führte.
- dass der Atemwegswiderstand und die bronchiale Überempfindlichkeit sich gegenüber einer alleinigen Kochsalzinhalation durch die Physiotherapie mit dem RC-Cornet[®] PLUS NASAL signifikant senken ließen.

Produktmerkmale:

- befreit die oberen Atemwege von Schleim z. B. bei chronischer Sinusitis
 - lindert den Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
 - senkt bronchiale Hyperreagibilität¹⁾ z. B. bei Asthma
 - hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
 - verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
 - verbessert auch Erkrankungen der unteren Atemwege wie z. B. COPD oder Asthma
 - entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
 - integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse
- Als Zubehör bieten wir das VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an (siehe Seite 7).

RC-Cornet[®] PLUS NASAL
PZN 12 441 330
Artikel-Nr. 2680

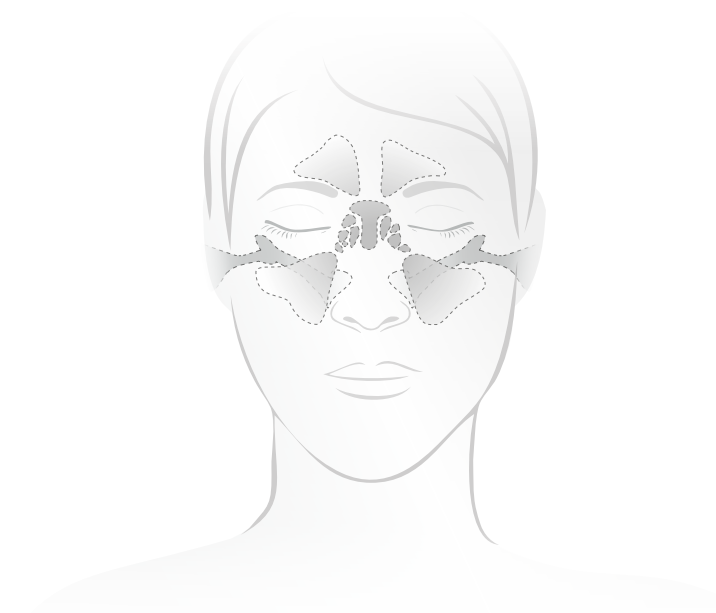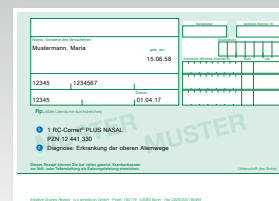

Natürlich die oberen Atemwege therapieren

Einzigartig für Ihre Gesundheit

Das RC-Cornet[®] PLUS NASAL befreit die oberen Atemwege sanft von Schleim. Die Schleimhaut kann sich so bei regelmäßiger Anwendung wieder regenerieren. Die Nase wird besser belüftet und spürbar freier – **ganz ohne den Einsatz von Medikamenten.**

Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit z. B. bei Asthma wird gesenkt.

Bei der Ausatmung über das RC-Cornet[®] PLUS NASAL entsteht ein individuell einstellbarer, positiver Ausatemdruck mit Schwingungen, der die Schleimhäute in den oberen Atemwegen therapiert – vergleichbar mit einer Massage.

Die Wirkung der RC-Cornet[®] PLUS NASAL Therapie

Anhand von Bildern der Temperaturverteilung im Gesicht lassen sich die Ergebnisse der Therapie deutlich erkennen.


(Abb. 1) Ausgangsbefund einer chronischen Sinusitis mit deutlich angeschwollenen Schleimhäuten (verstärkte rote und gelbe Einfärbung).

(Abb. 2) Nach Benutzung des RC-Cornet[®] PLUS NASAL ist ein deutliches Abschwellen der Schleimhäute und damit Weitung der Nasennebenhöhlen (Reduktion der roten und gelben Einfärbungen) festzustellen. **Die Nase ist freier.**

Abb. 1



Abb. 2

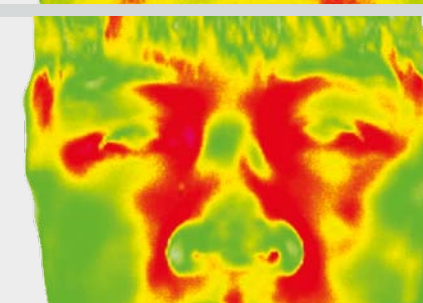

NASE WIRD FREIER





RC-Cornet® (Basiscornet)

Atemtherapiegerät für die unteren Atemwege

Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot.

Studien belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet® Therapie den Antibiotikabedarf und die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten reduziert.¹⁾

Produktmerkmale:

- befreit die Atemwege effektiv von festsitzendem Bronchialschleim
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- lageunabhängig

Der RC-Cornet® Adapter mit Mundstück (Artikel-Nr. 225, PZN 01 413 135) ermöglicht die gleichzeitige Durchführung von Atem- und Inhalationstherapie zur optimierten Medikamentendeposition.

Das RC-Cornet® Nasenset (Artikel-Nr. 221, PZN 08 862 333) ermöglicht die Umrüstung zu einem RC-Cornet® N für die Therapie der oberen Atemwege.

Das RC-Cornet® Tracheoset (Artikel-Nr. 270, PZN 11 543 092) ermöglicht auch tracheotomierten Patienten die RC-Cornet® Therapie.

INFO

RC-Cornet®
PZN 08 418 667
Artikel-Nr. 210
Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenspezialarzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0004



RC-Cornet® N (Nasencornet)

Atemtherapiegerät für die oberen Atemwege

Die sanfte Atemtherapie für eine freie Nase.

Das RC-Cornet® N verschafft bei regelmäßiger Anwendung effektiv und auf natürliche Weise eine freie Nase / sekretfreie Nasennebenhöhlen.

Produktmerkmale¹⁾:

- wirkt langfristig abschwellend im gesamten Nasen-Rachen-Raum und befreit von lästigem Schleim im Nasen-Rachen-Raum
- lindert Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom, senkt bronchiale Hyperreagibilität bei Asthma, hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs (Tubenventilationsstörungen)
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Erwachsene und Kinder

Der RC-Cornet® Adapter (Artikel-Nr. 225, PZN 01 413 135) verbindet das RC-Cornet® N mit vielen gängigen Verneblern zur gleichzeitigen Durchführung von Atem- und Inhalationstherapie.

Das RC-Cornet® Mundset (Artikel-Nr. 214, PZN 01 356 503) ermöglicht die Umrüstung zu einem RC-Cornet® für die Therapie der unteren Atemwege.

Artikel-Nr. 220 + 225

INFO

RC-Cornet® N
PZN 08 862 327
Artikel-Nr. 220





Threshold® IMT

Effektives Training für die Einatemmuskulatur

Inspiratorischer Atemmuskeltrainer zur Verbesserung der Ausdauer und der physischen Belastbarkeit von Patienten mit Atemwegserkrankungen.

Produktmerkmale:

- steigert auf physikalische Weise Kraft und Ausdauer der Einatemmuskulatur
- individuell einstellbare Widerstände (9 bis 41 cm WS) ermöglichen gezieltes Training
- verbessert die Kraft der Atempumpe und kann so die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen
- geeignet zur prä- und postoperativen Prophylaxe von Risikopatienten mit Atemwegserkrankungen
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch
- der Threshold® IMT Sauerstoffadapter ermöglicht Patienten mit Sauerstofflangzeittherapie das Training bei gleichzeitiger Sauerstoffzufuhr



INFO

Threshold® IMT
PZN 03 549 465
Artikel-Nr. 430

Threshold® IMT Sauerstoffadapter¹⁾
Artikel-Nr. 433



PEP-Maske

Effektives Lösen von Bronchialschleim

Die PEP-Maske¹⁾ sorgt beim Ausatmen dafür, dass die Bronchien sich erweitern und festsitzender Schleim gelöst wird.

Produktmerkmale:

- mobilisiert Bronchialschleim
- erleichtert das Abhusten von Bronchialschleim
- verhindert Atemwegsverschlüsse und Schleimrückstände bei Elastizitätsstörungen der Lunge
- aktiviert das Surfactant (oberflächenaktive Substanz)
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch



INFO

PEP-Maske
PZN 03 549 413
Artikel-Nr. 410

Moderne Inhalationstechnik
hilft sofort bei kleinen und
großen Atemnotattacken



Ständiger Begleiter im Alltag, Retter in der Notsituation!


Das Konzept „Mit Sicherheit Leichter Atmen“ bietet Atemwegspatienten die Möglichkeit, im Alltag sowie auch im Notfall einen ständigen und zuverlässigen Begleiter zu haben.

Der Sicherheitsbeutel

Die wiederverschließbare Umverpackung des RC-Chamber[®] dient als Sicherheitsbeutel. Er fasst den RC-Chamber[®] mit Maske, das Medikamentenspray, ein Peak-Flow-Meter sowie alle wichtigen Medikamente.



Alle RC-Chamber[®] Modelle, das Peak-Flow-Meter Personal Best[®] sowie die Medikamente sind vom Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt separat zu rezeptieren.

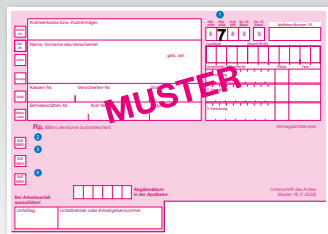

Mit dem Sicherheitskonzept im Alltag und im Notfall gerüstet

Die Einatemkontrolle

Das Ventil des RC-Chamber[®] ist gleichzeitig die integrierte, optische Einatemkontrolle. Sie ist für jedermann sichtbar.

Gerade im Notfall gibt diese Rückmeldung, ob und wie oft inhaliert wird.



Der Schutzengel-Anhänger

Lochen Sie den Sicherheitsbeutel oberhalb des Druckverschlusses. Befestigen Sie den Schutzengel-Anhänger am Sicherheitsbeutel und setzen Sie ein Signal für den Notfall.



Der Notfallplan

Der ausgefüllte Notfallplan wird direkt auf der Rückseite des Sicherheitsbeutels/Umverpackung angebracht, sodass jedem ersichtlich ist, wie dem Betroffenen im Notfall geholfen werden kann.

Notfallplan

Anzeichen Asthma-Anfall: Atemnot, Kurzatmigkeit, ich kann kaum sprechen, pfeifende Atemgeräusche, evtl. heftiger Husten o.ä.

Telefonnummer Kontaktperson: _____

Wenn möglich bitte Peak-Flow-Wert messen: > _____

1. Medikament zur Inhalation: _____

2. Anzahl der Sprühdosierungen: _____ mal mit dem RC-Chamber[®] inhalieren. Dosieraerosol vor Gebrauch kräftig schütteln.

Bitte atemerleichternde Stellungen einnehmen (Torwartstellung): Knie sind leicht gebeugt, oberhalb der Knie werden die Hände auf die Oberschenkel gestützt.

Bitte helfen Sie mir!

3. Nach 5–10 Minuten keine Besserung?

Wenn möglich bitte nochmals Peak-Flow-Wert messen: > _____

- Inhalation wiederholen, Anzahl der Sprühdosierungen: _____
- Tablette _____

aus dem Beutel verabreichen. Anzahl: _____

Wenn keine Besserung eintritt oder der Patient bewusstlos ist, sofort Notarzt (DE 112|CH+AT144) anrufen und Kontaktperson kontaktieren.

Meine Erziehungsberechtigten sind mit vorstehenden Maßnahmen einverstanden.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Dieser Notfallplan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde gewissenhaft nach Literaturvorgaben zusammengestellt.

CEGLA




RC-Chamber[®] / vormals RC Space Chamber Compact plus[®] Tief durchatmen – leicht gemacht

Der RC-Chamber[®] optimiert die Inhalation mit Dosieraerosolen.¹⁾

Produktmerkmale:

- Inhalierhilfe bei chronischen Atemwegserkrankungen
- die Koordination zwischen Auslösen und Einatmen des Dosieraerosols entfällt
- filtert die großen, nicht lungengängigen Partikel aus, vermindert so Ablagerungen und Pilzbefall im Mund- und Rachenraum
- der RC-Chamber[®] verhindert Reizungen durch Verdunstungskälte
- die therapeutische Wirkung der Medikamente wird optimiert
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch

Die beste Medikamentendeposition wird über das Mundstück erreicht. Kinder sollten, wenn möglich, stets über das Mundstück angelernt werden.

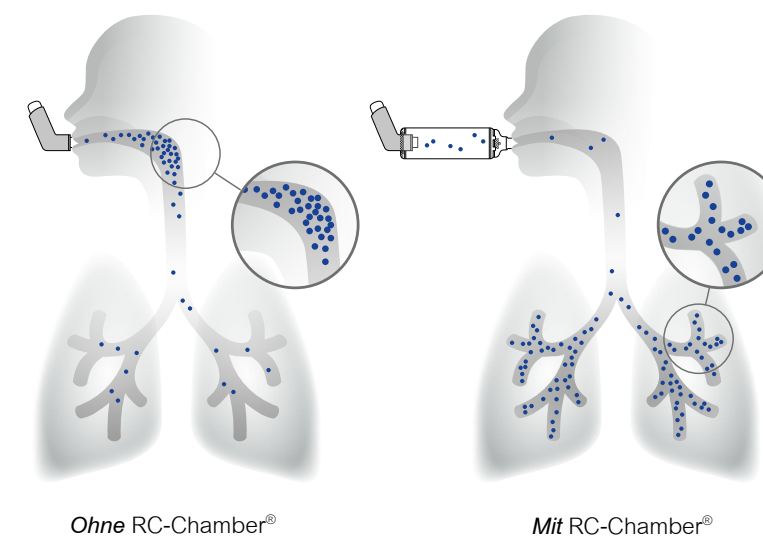

Die Wirkung der RC-Chamber[®] Therapie

Ohne RC-Chamber[®] kommt es zu einer starken Medikamentenablagerung im Mund- und Rachenraum.

Mit RC-Chamber[®] verbessert sich die Medikamentenverteilung in der Lunge.

INFO

RC-Chamber[®]
vormals RC Space Chamber Compact plus[®]

RC-Chamber[®] mit Maske für:

- Säuglinge 0–1 Jahr
Artikel-Nr. 30100 | PZN 11 710 992
- Kleinkinder 1–5 Jahre
Artikel-Nr. 30200 | PZN 11 711 000
- Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 30400 | PZN 11 711 017

RC-Chamber[®] mit Mundstück für:

- Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 30300 | PZN 11 711 023

RC-Masken
passend für RC-Chamber[®], RC Space Chamber Compact plus[®] und RC-Chamber reusable


RC-Masken:

- Säuglinge 0–1 Jahr
Artikel-Nr. 3011 | PZN 09 467 455
- Kleinkinder 1–5 Jahre
Artikel-Nr. 3021 | PZN 09 467 509
- Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 3041 | PZN 09 467 478

RC-Maske Tracheostoma für:

- tracheotomierte Patienten
Artikel-Nr. 3012 | PZN 11 188 165

Alle RC-Chamber[®] Modelle sind durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter der Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001 erstattungsfähig.

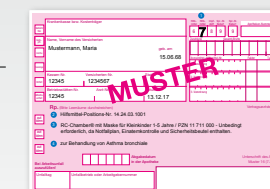



Hygienisch

zuverlässige Reinigung bis zu 100 °C im Vaporisator oder im RC-Clean Reinigungsbeutel.

Einfach

in der Anwendung – optimiert die Inhalation mit Dosieraerosolen.

Sicher

im Alltag sowie im Notfall.

RC-Chamber[®] – die Pluspunkte im Überblick:

- a. **ergonomisches Mundstück** – fördert die optimale Aufnahme des Medikaments besonders bei Kindern
- b. **optische Einatemkontrolle** – Sie erkennen, wenn das Medikament eingeatmet wird
- c. **transparentes Design** – Sie erkennen Fremdkörper und Verunreinigungen, bevor Sie einatmen
- d. **Universaladapter** – mit allen Dosieraerosolen kompatibel
- e. **austauschbare Silikonmasken** – Masken stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung – passen sich weich und angenehm der Gesichtsform an
- f. **zuverlässige Reinigung** – entweder in kochendem Wasser oder mit dem RC-Clean Reinigungsbeutel für die Mikrowelle



RC-Chamber[®] vormals RC Space Chamber Compact plus[®] für tracheotomierte Patienten

Ermöglicht tracheotomierten und Weaning-Patienten die Inhalation mit Dosieraerosolen.¹⁾

Die Inhalierhilfe ist für kanülierte als auch für Patienten mit einem offenen Tracheostoma geeignet.


Produktmerkmale:

- optimiert die therapeutische Wirkung der Medikamente nach einem Luftröhrenschnitt
- bietet tracheotomierten Patienten alle Vorteile der Inhalationstherapie
- kann ohne Maske direkt mit der Trachealkanüle verbunden werden
- über die RC-Maske Tracheostoma (Artikel-Nr. 3012 / PZN 11 188 165) kann der RC-Chamber[®] auch bei offenem Tracheostoma angewendet werden
- die optische Einatemkontrolle zeigt der pflegenden Person, wann das Medikament eingeatmet wird
- erstattungsfähig



RC-Chamber[®]
für tracheotomierte Patienten
vormals RC Space Chamber Compact plus[®]
Artikel-Nr. 30450 | PZN 12 731 648
Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001

RC-Maske Tracheostoma
für tracheotomierte Patienten
Artikel-Nr. 3012 | PZN 11 188 165

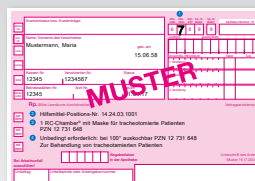





RC-Clean

Reinigen wie die Profis – einfach, schnell und sicher

Der RC-Clean Reinigungsbeutel ermöglicht die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle.

Produktmerkmale:


Für die Reinigung eignen sich alle Produkte, die auskochbar und mikrowellengeeignet sind, wie z. B.:

- die gesamte RC-Cornet® PLUS Familie
- die gesamte RC-Cornet® Familie (exklusive Artikel-Nr. 270)
- die gesamte RC-Chamber®/ RC Space Chamber Compact plus® Familie
- alle Masken zur Inhalation
- Schnuller und Babyflaschen

Mikrobiologische Untersuchungen bestätigen die Effektivität des RC-Clean Reinigungsbeutels.¹⁾

Produktdetails:

Eine Packung enthält 5 RC-Clean Reinigungsbeutel. Ein RC-Clean Reinigungsbeutel kann bis zu 20 Mal wiederverwendet werden.

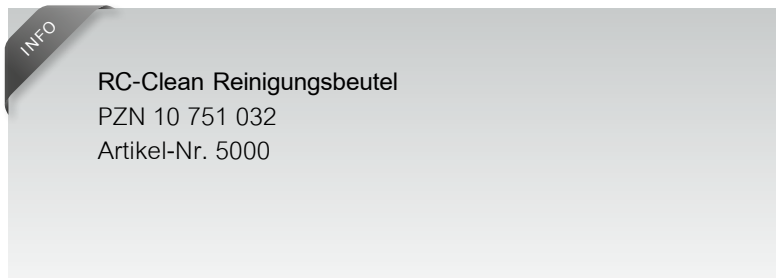

Produkte, Zubehör & Ersatzteile

Übersicht zum Heraustrennen

Produktfoto	Produktname / Hilfsmittel-Positions-Nr.	Beschreibung / Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Atemtherapie (für die häusliche und klinische Anwendung)				
RC-Cornet® PLUS Familie	 RC-Cornet® PLUS erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Atemphysiotherapiegerät untere Atemwege Löst Schleim, reduziert Atemnot und Husten	12 419 336	2600
	 RC-Cornet® PLUS TRACHEO erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Manuelle Schleimlösung bei Tracheostomie	12 441 324	2690
	 RC-Cornet® PLUS NASAL	Atemphysiotherapiegerät obere Atemwege Freie Nase – ohne Medikamente	12 441 330	2680
	 RC-Cornet® PLUS Mundstück	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß oder Verlust	13 348 503	2620
	 RC-Cornet® PLUS Zusatzmundstück oval	für Schlaganfall- oder neuromuskuläre Patienten geeignet	13 753 391	2622
	 RC-Cornet® PLUS Tracheoansatz	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß oder Verlust	13 348 532	2621
	 RC-Cornet® PLUS NASAL SET (Nasenolive und Winkelstück)	zur Umrüstung auf RC-Cornet® PLUS NASAL, ermöglicht Anwendung der Kombi-Therapie	13 058 202	2683
	 RC-Cornet® PLUS Ersatzventilschläuche	passend für alle Produktvarianten des RC-Cornet® PLUS, 2er-Set, Silikon	13 058 194	2660
	 RC-Cornet® PLUS Reinigungshilfe	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 753 422	2670
	 RC-Cornet® PLUS Gehäusedeckel	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 753 416	2611
	 RC-Cornet® PLUS Ventil	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	13 753 439	2640
	 RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET	ermöglicht die Verbindung mit nicht genormten Verneblern bei der Kombi-Therapie	14 439 900	2651
RC-Cornet® Familie	 RC-Cornet® (Basiscornet) erstattungsfähig unter 14.24.08.0004	Atemphysiotherapiegerät untere Atemwege Löst Schleim, reduziert Atemnot und Husten	08 418 667	210
	 RC-Cornet® N (Nasencornet)	Atemphysiotherapiegerät obere Atemwege Freie Nase – ohne Medikamente	08 862 327	220
	 RC-Cornet® / RC-Cornet® N Silikon-Ersatzventilschläuche	passend für RC-Cornet® und RC-Cornet® N, 2er-Set, Silikon	00 458 147	216
	 RC-Cornet® Adapter mit Mundstück	ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit RC-Cornet® und RC-Cornet® N	01 413 135	225
	 RC-Cornet® Tracheoset	ermöglicht tracheotomierten Patienten die Therapie mit dem RC-Cornet®	11 543 092	270
	 RC-Cornet® Nasenset	ermöglicht Umbau von RC-Cornet® in RC-Cornet® N	08 862 333	221
	 RC-Cornet® Mundset	ermöglicht Umbau von RC-Cornet® N in RC-Cornet®	01 356 503	214
	 RC-Cornet® Ersatzmundstück	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	01 356 526	212
	 RC-Cornet® / RC-Cornet® N Ersatzschalldämpfer	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	01 356 549	213
	 RC-Cornet® / RC-Cornet® N Trocknungsspatel	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	01 356 555	223
	 RC-Cornet® / RC-Cornet® N Einführhilfe	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	01 356 532	224
	 Threshold® IMT	Effektives Training für die Einatemmuskulatur	03 549 465	430
Diverse	 Threshold® IMT Sauerstoffadapter	ermöglicht die Sauerstoffzufuhr bei gleichzeitiger Anwendung des Threshold® IMT		433
	 PEP-Maske	Effektives Lösen von Bronchialschleim	03 549 413	410

Produktfoto	Produktname / Hilfsmittel-Positions-Nr.	Beschreibung / Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Inhalationstherapie (für die häusliche und klinische Anwendung)				
	RC-Chamber® erstattungsfähig unter: 14.24.03.1001 mit Maske für Säuglinge 0 – 1 Jahr mit Maske für Kleinkinder 1 – 5 Jahre mit Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren mit Mundstück für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren für tracheotomierte Patienten	Inhalierhilfe inkl. Sicherheitsbeutel, Notfallplan und Schutzengel-Anhänger 	11 710 992	30100
			11 711 000	30200
			11 711 017	30400
			11 711 023	30300
			12 731 648	30450
	RC-Maske für Säuglinge 0 – 1 Jahr	passend für RC-Chamber®, RC Space Chamber Compact plus® und RC-Chamber reusable	09 467 455	3011
	RC-Maske für Kleinkinder 1 – 5 Jahre	passend für RC-Chamber®, RC Space Chamber Compact plus® und RC-Chamber reusable	09 467 509	3021
	RC-Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren	passend für RC-Chamber®, RC Space Chamber Compact plus® und RC-Chamber reusable	09 467 478	3041
	RC-Maske Tracheostoma	passend für RC-Chamber®, RC Space Chamber Compact plus® und RC-Chamber reusable	11 188 165	3012
Sauerstofftherapie				
	Nasal-/Oral-Brille	Sauerstoffbrille für Nase und Mund	07 423 755	750
	RC-Sauerstoffnasenbrille Kraton für Erwachsene für Kinder für Säuglinge	Sauerstoffbrille für Nase – phthalatfrei	03 367 304	710
			03 367 853	711
			03 367 310	712
	Verlängerungsschlauch 4,3 m Verlängerungsschlauch 6,1 m Verlängerungsschlauch 7,6 m Verlängerungsschlauch 10,7 m Verlängerungsschlauch 12,2 m Verlängerungsschlauch 15,2 m	für RC-Sauerstoffnasenbrille für RC-Sauerstoffnasenbrille für RC-Sauerstoffnasenbrille für RC-Sauerstoffnasenbrille für RC-Sauerstoffnasenbrille für RC-Sauerstoffnasenbrille		731
				732
				733
				737
				738
	Swivel Verbindungsstück m/m zwischen zwei Schläuchen	Entwicklungswirbel	03 367 296	720
	Swivel Verbindungsstück m/f zwischen Sauerstoffgerät und Schlauch	Entwicklungswirbel	03 367 273	721
Messtechnik				
	RC-Test Asthma erstattungsfähig unter: 21.24.01.1004	Digitale Kontrolle der Atemwegsweite bei Asthma	07 117 691	150
	RC-Test COPD erstattungsfähig unter: 21.24.01.1003	Digitaler Lungenfunktionstest bei COPD und Emphysem	07 117 716	160
	Peak-Flow-Meter Personal Best® FR erstattungsfähig unter: 21.24.01.0016	Manuelle Kontrolle der Atemwegsweite für Erwachsene	07 031 280	135
	Peak-Flow-Meter Personal Best® LR erstattungsfähig unter: 21.24.01.0002	Manuelle Kontrolle der Atemwegsweite für Kinder und COPD-Patienten bis max. 375 l/min	09 476 603	140
	Sicherheitsmundstück mit Silikon-Rückstromventil	für RC-Test Asthma / RC-Test COPD	06 426 332	460
	Sicherheitsmundstück mit Silikon-Rückstromventil	für Peak-Flow-Meter Personal Best®	06 426 326	139
Hygiene				
	RC-Clean Reinigungsbeutel	Hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle	10 751 032	5000

Produktfoto	Produktname / Hilfsmittel-Positions-Nr.	Beschreibung/Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Pflege				
	RC-Gel NASAL	Wohltuende Pflege für die Nase	12 510 686	260
	RC-Pflege® N	Nasen- & Rachenspray	06 415 162	250
	RC-RHINO HORN™	zur Nasenspülung bei Erwachsenen	12 436 004	821
	RC-RHINO HORN™ JUNIOR	zur Nasenspülung bei Kindern	12 585 738	822
	RC-Pflege Lotion	Entzündungshemmende und feuchtigkeitsspendende Lotion	11 228 031	9500
	RC-Pflege Creme	Feuchtigkeitsspendende Creme	11 228 048	9510
Klinik/außerklinische Beatmung				
	RC-Chamber reusable	Inhalierhilfe für den Mehr-Patienten-Gebrauch mit Mundstück für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren		3061
		mit Maske für Säuglinge 0 – 1 Jahr		3071
		mit Maske für Kleinkinder 1 – 5 Jahre		3081
		mit Maske für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren		3091
	Austauschbare Masken siehe RC-Chamber®			
	CombiHaler® Solo	Inhalierhilfe für beatmete Patienten mit MDI-Port nur für die Dosieraerosol-Adaption	11 562 103	382
	CombiHaler®	Inhalierhilfe für beatmete Patienten mit Anschluss für Aeroneb-Vernebler, MDI-Port und Respimat® Adapter	11 562 095	381
	RC-Cornet® PLUS Familie	Atemphysiotherapiegerät untere Atemwege Löst Schleim, reduziert Atemnot und Husten		siehe Seite II
	RC-Cornet® PLUS Ersatzventilschläuche	passend für alle Produktvarianten des RC-Cornet® PLUS, 10er-Klinikset, Silikon		2660 k
	RC-Cornet® Familie	Atemphysiotherapiegerät untere Atemwege Löst Schleim, reduziert Atemnot und Husten		siehe Seite II
	RC-Cornet® Silikon-Ersatzventilschläuche	passend für das RC-Cornet®, RC-Cornet® N, 10er-Klinikset, Silikon	00 458 147	216 k
	RC-Adapter für Trachealkanüle / Tubus	ID 15 mm / AD 22 mm	11 188 171	361
	RC-Adapter für Beatmungsschlauch	ID 22 mm / ID 22 mm	11 188 188	362
	RC-Adapter für Beatmungsschlauch	ID 15 mm / ID 22 mm	11 188 194	363
	RC-Adapter für Beatmungsschlauch	ID 22 mm / AD 15 mm	11 188 159	364
	T-Adapter mit MDI-Port	ID 15 mm / AD 15 mm		369
	T-Adapter mit MDI-Port	ID 22 mm / AD 22 mm		371



Atemwegserkrankungen
einfach und sicher im
Blick mit modernen
Messtechnikprodukten



Produkte sind erhältlich
im Online-Shop unter
www.cegla-shop.de
sowie in Apotheken und
Sanitätshäusern.



Weitere Informationen
und Filme finden Sie unter
www.cegla.de



angezeigte Messwerte:

- Peak-Flow (PEF)
- FEV1 (Einsekundenkapazität)

RC-Test Asthma

Digitale Kontrolle der Atemwegsweite bei Asthma

Ermöglicht ein effektives Asthma-Management.

Produktmerkmale:

- misst und speichert Ihre Peak-Flow- (PEF) und Einsekundenkapazitätswerte (FEV1)
- mit automatischer Test-Qualitätskontrolle (vergleicht 3 Messungen)
- speichert 600 Tests
- mit Ampelsystem (individuelle Normwerte werden eingegeben und gespeichert)
- geeignet für den Haus- und Praxisgebrauch
- mit abnehmbarem, hochwertigem Turbinen-Messkopf zur einfachen Desinfektion
- niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA-Batterien




INFO

RC-Test Asthma

PZN 07 117 691

Artikel-Nr. 150

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 21.24.01.1004

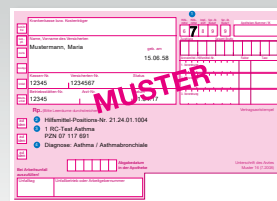

angezeigte Messwerte:

- FEV1, FEV6 absolut
- FEV1, FEV6 in % des Normwertes
- FEV1/FEV6 als Dezimalwert
- FEV1/FEV6 in % des Normwertes
- Lungenalter


RC-Test COPD

Der digitale Lungenfunktionstest bei COPD und Emphysem

Für die Kontrolle der COPD und Obstruktionen.

Produktmerkmale:

- einfaches, schnelles Screening bei COPD und Emphysem
- mit automatischer Anzeige der COPD-Klassifizierung (Stufe I-IV) gemäß GOLD 2006
- Anzeige des geschätzten Lungenalters
- misst die Sechsekundenkapazität (FEV6)
- mit automatischer Test-Qualitätskontrolle
- mit automatischer Angabe des Obstruktionsindex / integriertes Ampelsystem für die Einsekundenkapazität (FEV1)
- geeignet für den Haus- und Praxisgebrauch
- mit abnehmbarem, hochwertigem Turbinen-Messkopf zur einfachen Desinfektion
- niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA-Batterien

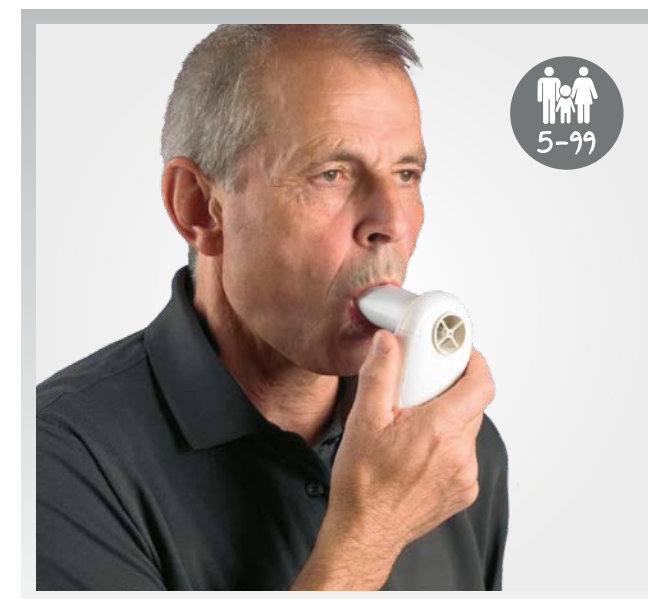


INFO

RC-Test COPD

PZN 07 117 716

Artikel-Nr. 160

Erstattungsfähig durch den Haus- oder Facharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 21.24.01.1003

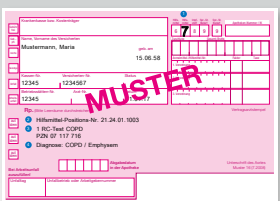



Peak-Flow-Meter Personal Best® FR

Zur manuellen Kontrolle der Atemwegsweite für Erwachsene

Misst den Ausatemspitzenfluss (PEF), von dem auf die „Weite“ der Bronchien geschlossen werden kann.

Produktmerkmale:

- Full-Range-Skala von 60–800 l/min
- Skala in 10er-Schritten
- geeignet für Erwachsene und Kinder
- ermöglicht Patienten eine schnelle Selbsteinschätzung und einfache Kontrolle des Gesundheitszustandes
- kompaktes Taschenformat mit Tagebuch
- hygienischer Schutz durch integrierte Schutzhülle
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch

Integriertes Ampelsystem

Das Ampelsystem ist eine ideale Hilfe, um einen sicheren Überblick über die Stabilität der Atemwege zu erhalten. Dank der Farbcodes ist schnell zu erkennen, ob und welcher Handlungsbedarf besteht.




INFO

Peak-Flow-Meter Personal Best® FR

PZN 07 031 280

Artikel-Nr. 135

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 21.24.01.0016

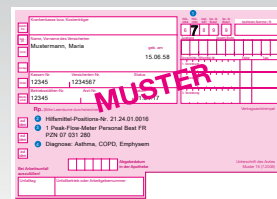

Peak-Flow-Meter Personal Best® LR

Zur manuellen Kontrolle der Atemwegsweite speziell für Kinder und COPD-Patienten bis max. 375 l/min

Misst den Ausatemspitzenfluss (PEF), von dem auf die „Weite“ der Bronchien geschlossen werden kann.

Produktmerkmale:

- Low-Range-Skala von 50–375 l/min
- Skala in 5er-Schritten
- geeignet für Kinder und COPD-Patienten
- ermöglicht Patienten eine schnelle Selbsteinschätzung und einfache Kontrolle des Gesundheitszustandes
- kompaktes Taschenformat mit Tagebuch
- hygienischer Schutz durch integrierte Schutzhülle
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch

Integriertes Ampelsystem

Das Ampelsystem ist eine ideale Hilfe, um einen sicheren Überblick über die Stabilität der Atemwege zu erhalten. Dank der Farbcodes ist schnell zu erkennen, ob und welcher Handlungsbedarf besteht.



INFO

Peak-Flow-Meter Personal Best® LR

PZN 09 476 603

Artikel-Nr. 140

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 21.24.01.0002





Mit Sauerstofftherapie
Bewegungsfreiheit
wiedergewinnen

Nasal-/Oral-Brille (vormals Oxynasor)




Nasal-/Oral-Brille

Die Sauerstoffbrille für Nase und Mund

Ideal bei Hautreizungen an der Nase.

Produktmerkmale:

- mit der Nasal-/Oral-Brille ist die Sauerstoffzufuhr über die Nase und den Mund möglich
- Platzierung am Naseneingang
- ermöglicht ein schonendes Tragen bei Hautreizungen der Nase, in der Nacht oder bei akuten Erkältungen, da der Kontakt mit der Nasenschleimhaut vermieden wird
- extra sicher durch Drei-Punkt-Fixierung
- das Verfahren ist wissenschaftlich belegt
- geeignet für die Zufuhr von Sauerstoff bei Erwachsenen mit einem Körpergewicht von > 30 kg
- die maximale Durchflussrate liegt bei 3 l/min
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch

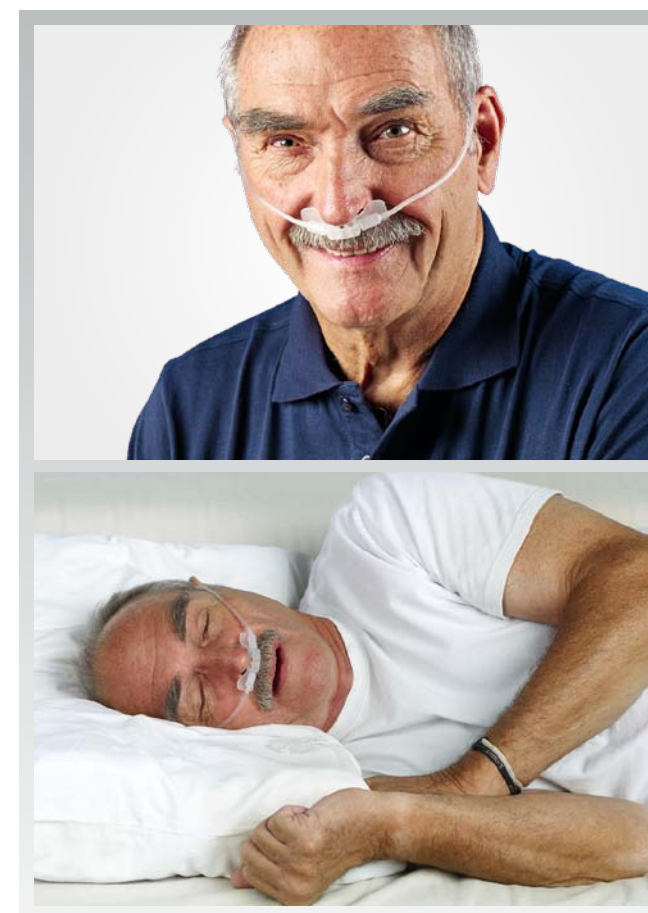

INFO

Nasal-/Oral-Brille
PZN 07 423 755
Artikel-Nr. 750

RC-Sauerstoffnasenbrille Kraton



RC-Sauerstoffnasenbrille Kraton

Die angenehme Art, sich Luft zu verschaffen

RC-Sauerstoffnasenbrille Kraton
ohne Phthalate für die Nase.

Produktmerkmale:

- weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern allergische Reaktionen und Druckstellen am Naseneingang
- ermöglicht eine medizinische Langzeit-sauerstofftherapie
- abknicksicherer Schlauch
- erhältlich in Ausführungen für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
- optionales Zubehör: Entwirrungswirbel Swivel verhindern Verdrehungen und damit Behinderungen der Sauerstoffzufuhr (siehe Seite 37)
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch
- gesundheitsschonend, da Schlauch und Nasenspitzen zu 100 % phthalatfrei sind




INFO

RC-Sauerstoffnasenbrille Kraton


für Erwachsene	PZN 03 367 304 Artikel-Nr. 710
für Kinder	PZN 03 367 853 Artikel-Nr. 711
für Säuglinge	PZN 03 367 310 Artikel-Nr. 712

Swivel Verbindungsstücke Entwirrungswirbel

Swivel m/m

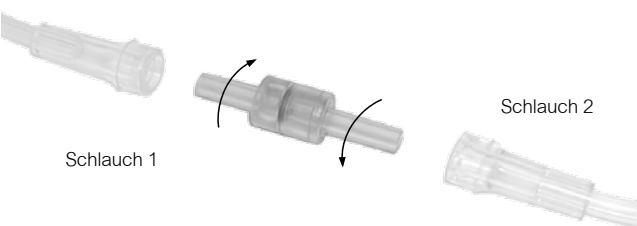

Swivel m/f

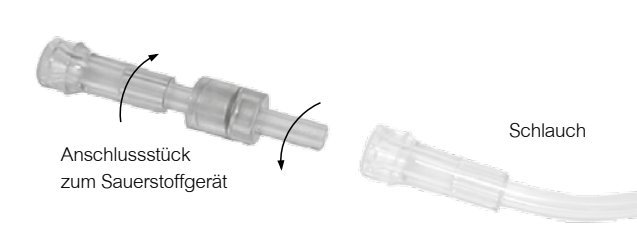

Swivel Verbindungsstücke

Das Zwischenstück verhindert Verdrehungen des O₂-Schlauches

Das Swivel Verbindungsstück verbindet im Rahmen der Langzeit-Sauerstofftherapie Schlauch und Sauerstoffgerät bzw. zwei Schläuche.

Produktmerkmale:

- verhindert Verdrehungen des O₂-Schlauches
- gewährleistet den Sauerstoffdurchfluss
- in zwei Ausführungen erhältlich:
 - Swivel m/f verbindet Sauerstoffgerät und O₂-Schlauch
 - Swivel m/m verbindet zwei O₂-Schläuche
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch

INFO

Swivel Verbindungsstück m/m
zwischen 2 Schläuchen
PZN 03 367 296 | Artikel-Nr. 720

Swivel Verbindungsstück m/f
zwischen Sauerstoffgerät und Schlauch
PZN 03 367 273 | Artikel-Nr. 721



RC-Pflege Produkte – erfrischend natürlich und einzigartig pflegend

Optimal abgestimmte Pflegeprodukte
für Atemwegspatienten



RC-Pflege Lotion & RC-Pflege Creme

Erfrischend natürlich und einzigartig pflegend

Anwendungsgebiete:

- Gesicht und Hände
- für anspruchsvolle, trockene Haut

RC-Pflege Lotion – entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend für anspruchsvolle und trockene Haut:

- wirkt entzündungshemmend
- beruhigt die Haut bei Juckreiz, Hautekzemen und Schuppenflechte
- reduziert Falten mithilfe von Kigelia-Extrakt und Matrixyl
- dermatologisch getestet

RC-Pflege Creme – feuchtigkeitsspendend für anspruchsvolle und trockene Haut:

- hautstraffend und pflegend
- aus hochwertigem Kigelia-Extrakt
- dermatologisch getestet
- ohne Parfüm

Tipp: Für eine optimale Wirkung empfehlen wir die kombinierte Anwendung von RC-Pflege Lotion und RC-Pflege Creme.

INFO	RC-Pflege Lotion	RC-Pflege Creme
	Inhalt 30 ml	Inhalt 30 ml
	PZN 11 228 031	PZN 11 228 048
	Artikel-Nr. 9500	Artikel-Nr. 9510



RC-Gel NASAL

Wohltuende Pflege für die Nase

Versorgt bei trockener Nase die Nasenschleimhäute mit natürlicher Feuchtigkeit.

Feuchtigkeit, wertvolle Inhaltsstoffe und eine regelmäßige Behandlung sind ausschlaggebend für das Wohlbefinden unserer Haut.

Produktmerkmale:

- rein natürliche Inhaltsstoffe
- tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet
- isotonische Meersalzlösung befeuchtet die Atemwege und beruhigt gereizte Haut
- Hyaluronsäure regt die Zellenneubildung an
- Menthol erweitert die Blutgefäße und erzeugt ein angenehmes Erfrischungsgefühl in der Nasenhöhle
- Dexpanthenol pflegt gereizte Haut und unterstützt den Heilungsprozess


Anwendungsgebiete:

- Hautreizungen am Naseneingang
- trockene und gereizte Schleimhäute
- verstopfte Nase
- allergische Beschwerden (Heuschnupfen, Hausstaubmilbe, Pollenallergie)
- chronische Sinusitis

Anwendung RC-Gel NASAL¹⁾



RC-Gel NASAL
Inhalt 20 ml
PZN 12 510 686
Artikel-Nr. 260

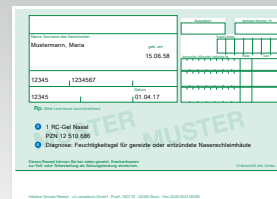

RC-Pflege^N


Reinigt und schützt Ihre Schleimhäute – effektiv und natürlich

RC-Pflege^N 1) wirkt pflegend, auch bei der Zufuhr von Sauerstoff.


Produktmerkmale:

- zur Befeuchtung der Nasen- und Rachenschleimhaut
- unterstützt die Regeneration sowie Wundheilung der Nasenschleimhäute
- reinigt die Nasennebenhöhlen von Staub, Pollen, Allergenen und trockenen Krusten
- begleitende Therapie bei Schnupfen, Heuschnupfen und ganzjährig allergischem Schnupfen
- täglich und dauerhaft anwendbar, ohne davon abhängig zu werden
- ist durch integrierten Sterilfilter auch nach Anbruch bis zu 3 Jahren haltbar
- ohne Konservierungsstoffe und Treibgas


Anwendung RC-Pflege^N als Nasenspray

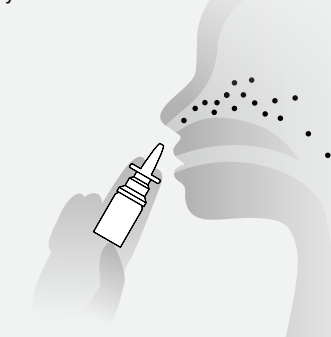

Anwendung RC-Pflege^N als Rachenspray

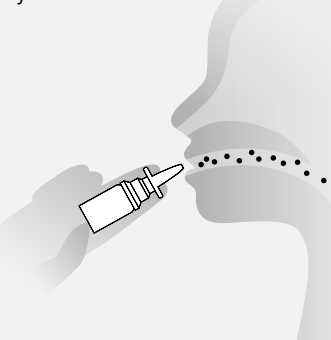

RC-Pflege^N
Inhalt 20 ml
PZN 06 415 162
Artikel-Nr. 250

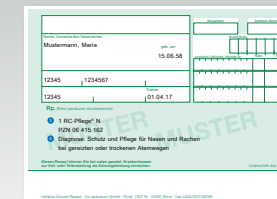



RC-RHINO HORN™

Natürliche Pflege der oberen Atemwege

Zur Nasenspülung.

Produktmerkmale:

- Pflege ohne Nebenwirkungen
- tägliche Anwendung schützt effektiv vor Austrocknung und Infekten
- einfache Anwendung
- effektiv zur Vorbeugung von Infekten und allergischer Beschwerden der Atemwege
- eine preiswerte Alternative, da über den beiliegenden Dosierlöffel handelsübliches Kochsalz selbst dosiert werden kann

Anwendungsgebiete:

- bei Erkältungsbeschwerden und Grippe
- bei Heuschnupfen, Pollen- oder Stauballergie
- für Patienten mit chronischer Sinusitis
- für Patienten mit chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege wie Asthma oder COPD
- im Anschluss an eine Operation im Bereich der Nasennebenhöhlen
- während der Schwangerschaft

INFO

RC-RHINO HORN™
PZN 12 436 004
Artikel-Nr. 821



RC-RHINO HORN™ JUNIOR

Natürliche Pflege der oberen Atemwege

Zur Nasenspülung.

Produktmerkmale:

- Pflege ohne Nebenwirkungen
- tägliche Anwendung schützt effektiv vor Austrocknung und Infekten
- einfache Anwendung
- effektiv zur Vorbeugung von Infekten und allergischer Beschwerden der Atemwege
- eine preiswerte Alternative, da über den beiliegenden Dosierlöffel handelsübliches Kochsalz selbst dosiert werden kann

Anwendungsgebiete:

- bei Erkältungsbeschwerden und Grippe
- bei Heuschnupfen, Pollen- oder Stauballergie
- für Patienten mit chronischer Sinusitis
- für Patienten mit chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege wie Asthma
- im Anschluss an eine Operation im Bereich der Nasennebenhöhlen
- speziell für Kindernasen entwickelt



INFO

RC-RHINO HORN™ JUNIOR
PZN 12 585 738
Artikel-Nr. 822

Besonderer Service von CEGLA: Produktschulungen inklusive der gesetzlichen Hygienevorschriften unter Berücksichtigung der KRINKO, MPBetreibV, den RKI-Richtlinien und des IfSG § 36



Einzigartige manuelle Schleimlösung bei Tracheostomie.

Das RC-Cornet® PLUS TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS. Über einen integrierten Tracheoansatz (15 mm) ermöglicht das RC-Cornet® PLUS TRACHEO Patienten mit einer Kanüle (Tubus) die Atemtherapie zur Schleimlösung.

Produktmerkmale:


- das RC-Cornet® PLUS TRACHEO bietet die gleichen Produktmerkmale wie das RC-Cornet® PLUS (siehe Seite 6)
 - speziell für tracheotomierte und sehr schwache Patienten geeignet
 - Unterstützung beim Weaning
 - integrierter, ISO-genormter 22 mm-Vernebler-ansatz ermöglicht die gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie mit Verneblern zur besseren Sekretolyse
- Als Zubehör bieten wir das RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an (siehe Seite 7).

- zudem ermöglicht dieses VERNEBLER SET die Adaption eines HME-Filters _____



Zubehör und Ersatzteile für das RC-Cornet® PLUS TRACHEO
finden Sie in der heraustrennbaren Übersicht in der Katalogmitte.

RC-Cornet® PLUS TRACHEO
PZN 12 441 324 | Artikel-Nr. 2690
Erstattungsfähig durch den
Haus-, Kinder- oder Lungen-
facharzt unter Hilfsmittel-
Positions-Nr. 14.24.08.0013

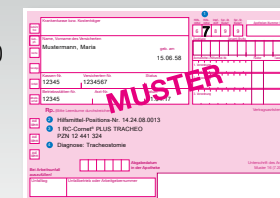

Informationen und Filme sind unter www.cegla.de verfügbar.






RC-Chamber reusable

Inhalierhilfe für den Mehr-Patienten-Gebrauch

Der RC-Chamber reusable ist optimal auf den Einsatz in der Klinik und Arztpraxen abgestimmt.

Produktmerkmale:

- für den Mehr-Patienten-Gebrauch geeignet (autoklavierbar, max. 134°C)
- kompatibel mit allen gängigen Dosieraerosolen
- kann direkt mit der Trachealkanüle verbunden werden
- die weichen Masken passen sich optimal der Gesichtsform an
- Masken sind auch einzeln erhältlich

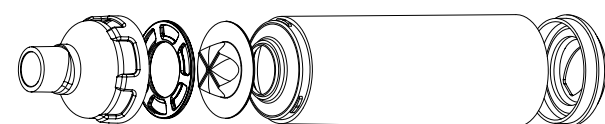

Die beste Medikamentendeposition wird über das Mundstück erreicht. Kinder sollten, wenn möglich, stets über das Mundstück angelernet werden.

- INFO**
- RC-Chamber reusable mit Mundstück für Erwachsene & Kinder ab 5 Jahren | Artikel-Nr. 3061
- RC-Chamber reusable mit Maske für
- Säuglinge 0–1 Jahre | Artikel-Nr. 3071
 - Kleinkinder 1–5 Jahre | Artikel-Nr. 3081
 - Erwachsene & Kinder ab 5 Jahren | Artikel-Nr. 3091



RC-Maske Tracheostoma


Ermöglicht tracheotomierten Patienten die Atemtherapie mit dem RC-Cornet® PLUS, dem RC-Cornet® sowie dem RC-Chamber®/ RC Space Chamber Compact plus® und RC-Chamber reusable.

Produktmerkmale:

- mithilfe des RC-Cornet® PLUS (s. S. 6 + 7) sowie des RC-Cornet® (s. S. 12) können tracheotomierte Patienten alle Vorteile der Atemtherapie nutzen
- mithilfe des RC-Chamber®/ RC-Compact Space Chamber plus (s. S. 20 + 22) sowie RC-Chamber reusable (s. S. 46) können tracheotomierte Patienten alle Vorteile der Inhalationstherapie nutzen

Anwendung:

Die RC-Maske Tracheostoma wird einfach auf das Mundstück des RC-Cornet® PLUS, des RC-Cornet®, des RC-Chamber®/RC Space Chamber Compact plus® oder des RC-Chamber reusable gesteckt und dann auf das offene Tracheostoma bzw. die Kanüle gesetzt.

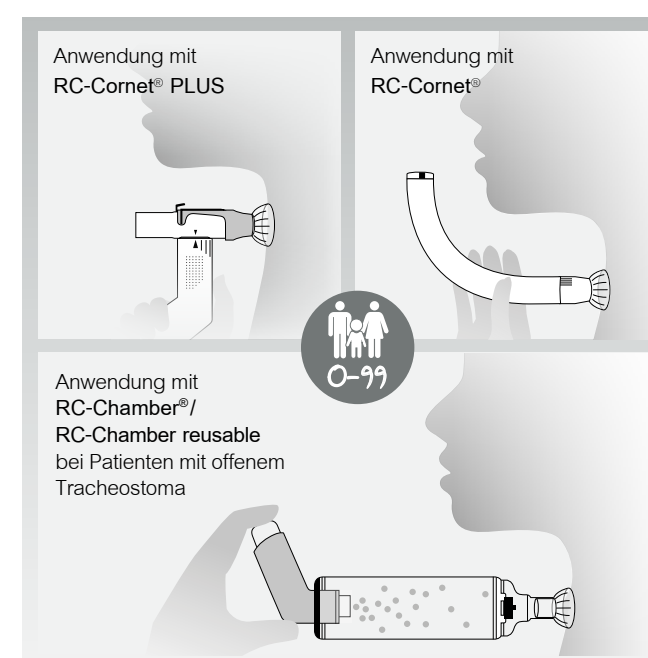

Die auf dieser Seite gezeigten Produkte (außer des RC-Chamber®/RC Space Chamber Compact plus®) sind auch für den Mehr-Patienten-Gebrauch geeignet.

INFO

RC-Maske Tracheostoma
PZN 11 188 165
Artikel-Nr. 3012



CombiHaler® Solo

Inhalierhilfe für beatmete Patienten

Der CombiHaler® Solo ist eine bei invasiven und nichtinvasiven mechanischen Beatmungssystemen einsetzbare Inhalierhilfe (Spacer).

Produktmerkmale:

- mit MDI-Port
- Einmalprodukt (Verweildauer bis zu 7 Tagen)
- optimiert die Verneblung von Dosieraerosolen bei beatmeten Patienten
- optimiert die Deposition bronchialgängiger Wirkstoffpartikel in der Lunge
- sichere und einfache Handhabung
- hygienisch durch Verschlussmöglichkeit
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch
- detaillierte Anwendungsbeschreibung auf Anfrage erhältlich

Für den sofortigen Einbau in das Beatmungssystem stehen zusätzlich verschiedene Adapter zur Verfügung – siehe Übersicht in der Katalogmitte. Die Adapter sind bei Bedarf separat zu erwerben.


Der CombiHaler® Solo sollte nach Gebrauch entsorgt werden.

INFO

CombiHaler® Solo

ohne Anschluss für Aeroneb-Vernebler mit MDI-Port nur für die Dosieraerosol-Adaption
PZN 11 562 103 | Artikel-Nr. 382
erstattungsfähig unter 14.24.03.1001

Beatmungssystem

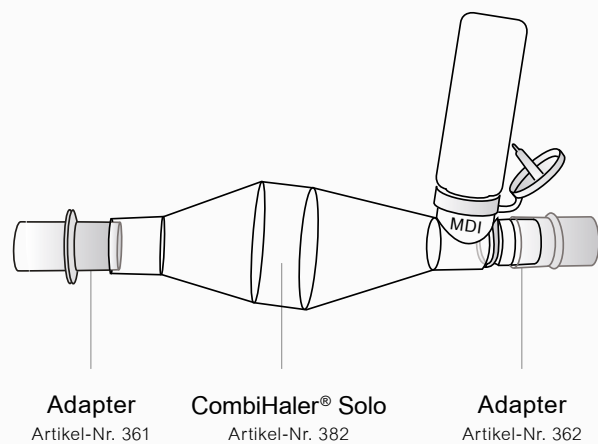

CombiHaler®

Inhalierhilfe für beatmete Patienten

Der CombiHaler® ist eine bei invasiven und nicht-invasiven mechanischen Beatmungssystemen einsetzbare Inhalierhilfe (Spacer).

Produktmerkmale:

- mit Anschluss für Aeroneb-Vernebler und MDI-Port sowie inkl. Respimat® Adapter
- Einmalprodukt (Verweildauer bis zu 7 Tagen)
- optimiert die Verneblung von Dosieraerosolen bei beatmeten Patienten
- optimiert die Deposition bronchialgängiger Wirkstoffpartikel in der Lunge
- sichere und einfache Handhabung
- hygienisch durch Verschlussmöglichkeit
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- nur für den Ein-Patienten-Gebrauch
- detaillierte Anwendungsbeschreibung auf Anfrage erhältlich

Für den sofortigen Einbau in das Beatmungssystem stehen zusätzlich verschiedene Adapter zur Verfügung – siehe Übersicht in der Katalogmitte. Die Adapter sind bei Bedarf separat zu erwerben.


Der CombiHaler® sollte nach Gebrauch entsorgt werden.

INFO

CombiHaler®

mit Anschluss für Aeroneb-Vernebler und MDI-Port sowie inkl. Respimat® Adapter
PZN 11 562 095 | Artikel-Nr. 381
erstattungsfähig unter 14.24.03.1001

Beatmungssystem

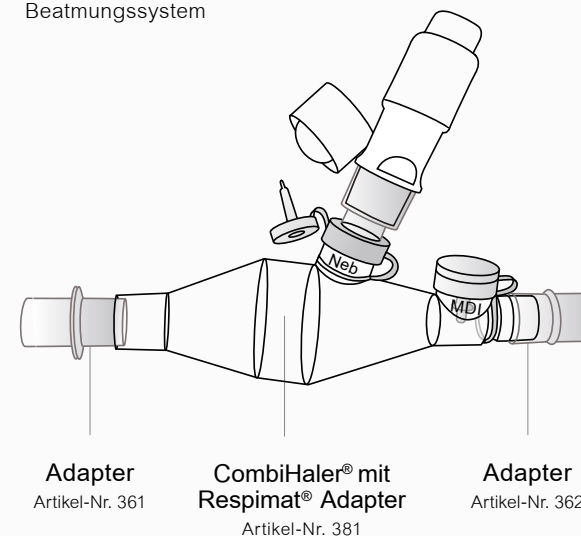



Die Lunge ist ein Wunder





Alle Videos auf Youtube



RCCHAMBER Familie

RC-Chamber® – Inhalationstherapie für Groß und Klein





RC-Chamber® – Das Sicherheitskonzept



Anwendung & Wirkprinzip



RC CORNET PLUS Familie

RC-Cornet® PLUS – Atemtrainer für die unteren Atemwege





Wirkprinzip



Anwendung



RC-Cornet® PLUS NASAL – Atemtrainer für die oberen Atemwege





Wirkprinzip



Anwendung



„LEICHTER ATMEN“ – DAS
ONLINE-GESUNDHEITSPORTAL

Experten geben Informationen rund um die Krankheiten COPD, Lungenemphysem und Asthma bronchiale




» Gemeinsam ist man
weniger allein«

Das Gesundheitsportal bietet umfassende Informationen für den Atemwegspatienten; damit ist es der kostenlose Begleiter mit Hilfestellungen rund um die Themen COPD, Lungenemphysem und Asthma.

Von medizinischen News, über die Erklärung von Krankheitsbildern und Therapieformen bis hin zu Tipps und Blogs zum Thema Psyche, Ernährung, Atemphysiotherapie und vieles mehr.



Besuchen Sie uns unter:
www.leichter-atmen.de

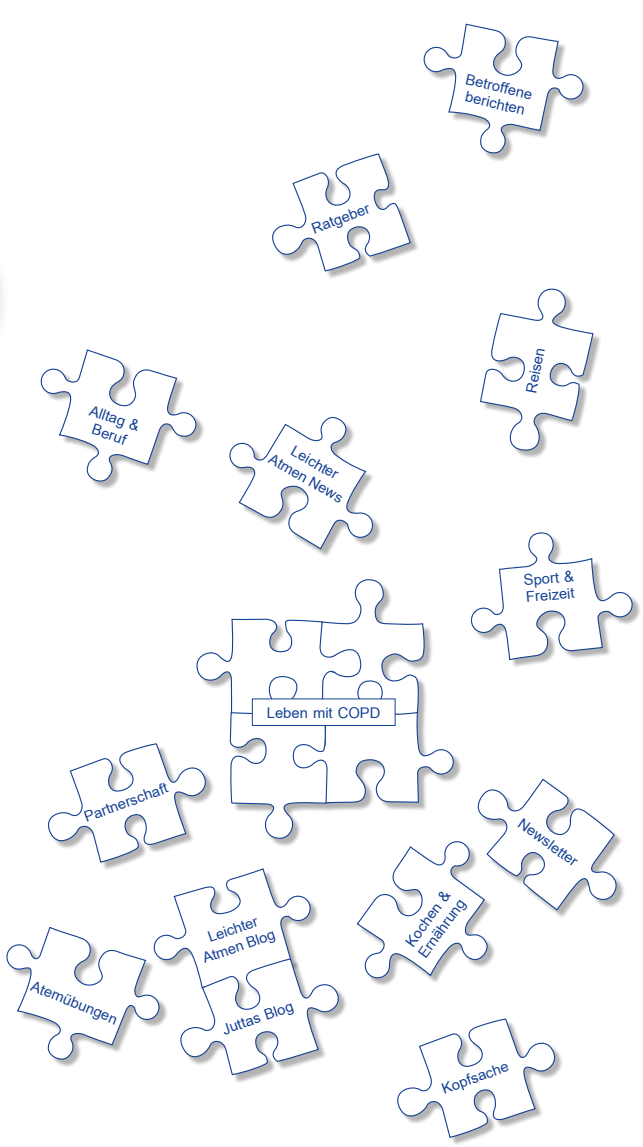

Mit Sicherheit
Leichter Atmen



Inhalierhilfe RC-Chamber® – inklusive Sicherheitsbeutel, Notfallplan und Schutzengel-Anhänger.

RC-Chamber® mit Maske für:

- Säuglinge 0 – 1 Jahr
Artikel-Nr. 30100 | PZN 11 710 992
- Kleinkinder 1 – 5 Jahre
Artikel-Nr. 30200 | PZN 11 711 000
- Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 30400 | PZN 11 711 017



Austauschbare Masken und verschiedene Modellvarianten für jedes Alter erhältlich.

RC-Chamber® mit Mundstück für:

- Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren
Artikel-Nr. 30300 | PZN 11 711 023

MUSTER

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs-mittel		Hilfs-mittel		Impf-stoff		Spr.-St. Bedarf		Spr.-St. Bedarf		Apotheken-Nummer / IK	
Gebühr frei		6		7		8		9		9			
Geb.-plf.		Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
noctu		Mustermann, Maria		15.06.58									
Sonstige		Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status		Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe	
Unfall		12345		1234567				1. Verordnung					
Arbeits-unfall		12345		Arzt-Nr.		Datum		3. Verordnung					
						1.6.17							
		Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		2		Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.03.1001						Vertragsarztstempel	
		aut idem		3		1 RC-Chamber® mit Mundstück PZN 11 711 023							
		aut idem		4		Diagnose: Asthma – unbedingt erforderlich, da Notfallplan, Einatemkontrolle und Sicherheitsbeutel enthalten.							
		aut idem											
		Bei Arbeitsunfall auszufüllen!				Abgabedatum in der Apotheke						Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)	
		Unfalltag				Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer							

Medikamente müssen separat verordnet werden.

Musterrezepte
Übersicht zum Heraustrennen



Atemtrainer



für die unteren Atemwege bei Asthma,
COPD und Mukoviszidose

- 2 Einstellungen mit je 4 Widerständen
- integrierter Vernebleransatz für eine gleichzeitige Atem- und Inhalationstherapie
- auskochbar und sterilisierbar
- Lageunabhängig



Löst Schleim, reduziert
Husten und Atemnot.

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei

Geb.-pfl. noctu

Name, Vorname des Versicherten
Mustermann, Maria geb. am **15.06.58**

Kassen-Nr. **12345** Versicherten-Nr. **1234567** Status

Betriebsstätten-Nr. **12345** Arzt-Nr. **1.6.17**

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

2 Hilfsmittel-Positions-Nr. **14.24.08.0013**

3 1 RC-Cornet® PLUS
Atemtherapiegerät PZN 12 419 336

4 Diagnose: Chronische Atemwegserkrankungen –
unbedingt erforderlich für Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (7.2008)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Leichter Atmen
mit Produkten von CEGLA



R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
www.cegla.de

Copyright 2018 by R. Cegla GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten,
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das
Unternehmen R. Cegla GmbH & Co. KG.

Produkte sind erhältlich im Online-Shop unter
www.cegla-shop.de sowie in Apotheken und Sanitätshäusern.