


FreeWheel

Wheelchair Attachment

Instandhaltung Ihres FreeWheels

Damit Sie jahrelang Freude an ihrem FreeWheel haben, ist es wichtig, einige Wartungs- und Instandhaltungshinweise zu befolgen. Prüfen Sie regelmäßig, besonders nach starken Beanspruchungen, folgendes:

1. Überprüfen Sie den festen Sitz der Schrauben A, B und C auf beiden Seiten mit einem 4mm Imbus-Schlüssel.
2. Stellen Sie sicher, dass die Winkeleinstellschraube D direkt auf dem querliegenden Bolzen Kontakt hat (Einstellung mit 5mm Imbus). Es soll kein Gewindegang sichtbar sein.
3. **WICHTIG** - Kontrollieren sie die Schraube D auf den festen Sitz mit einem 8mm Imbus und einem Drehmomentschlüssel auf 27 Nm. Es ist wichtig, die Schraube mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen, damit sie ausreichend fest sitzt.
4. Reinigen Sie Ihr FreeWheel regelmäßig von Schmutz und Schlamm, sowie von jeglichem Salzwasser, falls Sie Nahe am Meer gefahren sind.
5. Gelegentlich sollte das Kugellager hinter dem Einstellknopf vorne etwas Lagerfett verabreicht bekommen.

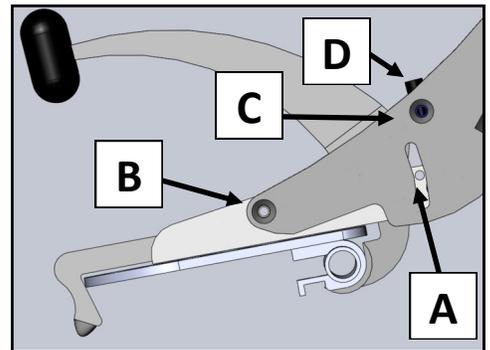

Bei Fragen wenden sie sich bitte an unsere Techniker oder sprechen Sie den verantwortlichen Produktmanager für FreeWheel an.

